

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA – Contendo:

Mandril guia
Cânula interna
Cânula externa

- **MEDIDAS:** 00 (05 mm) a 06 (12 mm).
 - **FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO**
Permitir a ventilação e respiração do paciente que não consegue respirar pela boca ou nariz, em casos de obstruções da laringe e em quaisquer tipos de traumas onde seja recomendado seu uso.
 - **ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
Fabricado em Latão cromado ou aço inox. Modelos: standard, longa e curta.
 - **INSTRUÇÕES DE USO**
Proceda a intubação e extubação conforme orientação médica.
 - **PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO.**
 - Produto não estéril. Troque o conjunto completo todos os dias ou quantas vezes forem necessárias para limpeza. É ideal que se tenha 2 conjuntos e que estes sejam utilizados em dias alternados. O período máximo de uso fica estabelecido conforme informação abaixo:
6 meses para a cânula de traqueostomia confeccionada em inox
2 meses para cânula de traqueostomia confeccionada em latão cromado.
Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com prazo de validade vencido.
Armazenar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo da luz.
Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados.
 - **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**
Coloque o conjunto da cânula de molho em água e sabão neutro por alguns minutos e esfregue a cânula externa e a cânula interna por dentro e por fora usando uma esponja adequada. Enxágüe em água corrente e desinfete o conjunto completo da seguinte forma: ferva água suficiente e deixe o conjunto completo por 10 minutos imerso na água fervida.
OBS: Como segurança mantenha sempre limpa a cânula interna, pois esta poderá ser trocada rapidamente em caso de entupimento.
 - **EFEITOS INDESEJÁVEIS**
O produto pode ter deformações em caso de quedas e pode sofrer alteração de cor (amarela) e o deslocamento do cromo (cânula de latão cromado) devido à ação química de fluidos corporais presentes no próprio organismo do paciente.

Nota: Neste caso substitua a mesma pela cânula de inox.
 - **VALIDADE**
5 anos a partir da data de fabricação.
- REG. MS: 10014160039 (cânula de latão cromado)
10014160040 (cânula em aço inox)


Fábio Luiz Silva
Responsável Técnico
CRBM/SP – 3940