



Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscara de não reinalação

Nome Comercial: **Máscara de Não Reinalação Descartável Hudson RCI**

Códigos do Fabricante: 1058 (Pediátrico – com duas válvulas de segurança); 1059 (Adulto - com duas válvulas de segurança); 1060 (Adulto - com três válvulas de segurança).


Nº de registro na ANVISA: 10342600058

O fabricante recomenda o uso único.


Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Foto

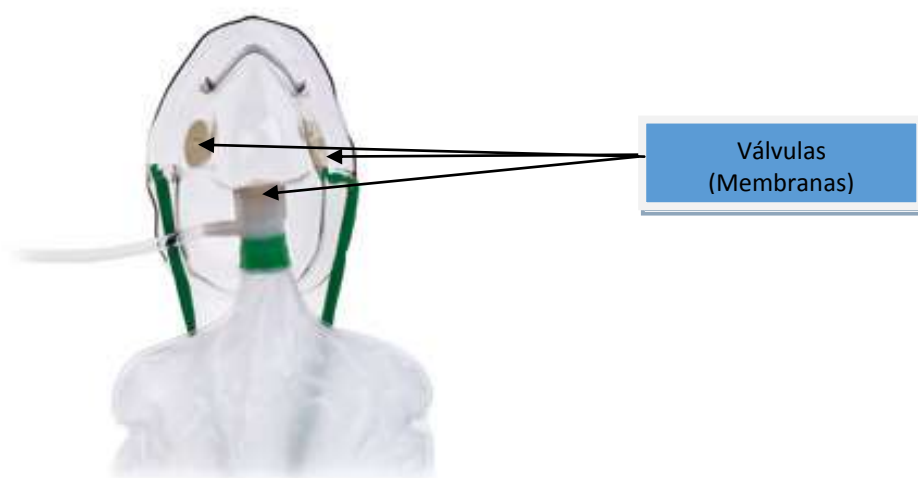

Modelo com três Válvulas.

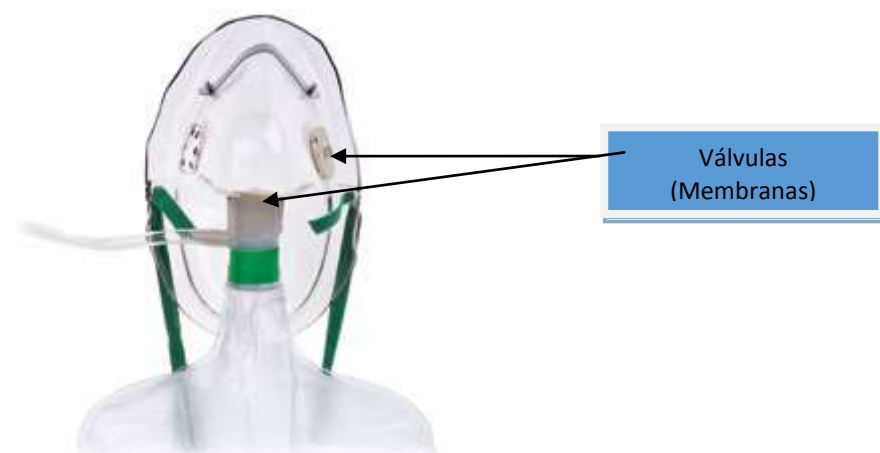

Modelo com duas Válvulas.

Descrição e Indicação

Máscara para oxigenioterapia em vinil macio e transparente facilitando avaliação visual, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável. Faixa elástica ajustável á face do paciente. Válvula de controle de baixa resistência. Previne a reinalação de gases e duas membranas na máscara permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750 mL e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10m de comprimento. Permite terapia com até 100% de O₂.



Instrução de Uso

1. Conecte o tubo de suprimento de oxigênio à fonte de gás.
2. Ajuste o fluxo de gás de acordo com a prescrição e verifique a permeabilidade do sistema.
3. Coloque a máscara à face do paciente com a tira elástica, posicionando-a abaixo das orelhas e ao redor do pescoço.
4. Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura.
5. Molde a tira de metal da máscara para melhor ajustá-la à face do paciente.

Composição

- Corpo da máscara: PVC e vinil.
 - Presilha metálica: Alumínio.
 - Tira elástica: vinil.
 - Válvula (pequena membrana que cobre os orifícios da máscara): vinil.
 - Tubo de suprimento de O₂ (2,10m): PVC.
 - Bolsa Reservatória: vinil.
- Produto sem látex.

Tratamento e Disposição

Os produtos contaminados devem ser descartados conforme regulamentações que referem à proteção ambiental, segurança e gerenciamento de resíduos - Resolução 306 de 7 de dezembro de 2004 (Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde).

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338.

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709