

PRODUTOS ORTOPÉDICOS DA CABEÇA AOS PÉS

SALVAPE



CÓDIGO

116

Entorses leves do tornozelo. Substitui a goteira gessada.
Prevenção e tratamento das deformidades da artrite reumatóide.

Modo de usar, vide verso

Não corra riscos. Exija produtos com Registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

www.salvape.com.br 

Informações Técnicas
Central de Atendimento
(11) 3346 4535
© Marca Registrada
Copyright © 2006 SalvaPe

Fabricado por:
SalvaPe Produtos Ortopédicos Ltda
CNPJ.: 60.883.741/0005-13
I.E.: 115.411.420.112
Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci
01521 000 - São Paulo - SP



Foto ilustrativa



611

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO®

ALCA-118 - Rev.00
Venda sob prescrição médica
Produto não perecível

INDICAÇÕES • Entorses leves do tornozelo • Prevenção e tratamento das deformidades da artrite reumatóide.

CARACTERÍSTICAS • Substituição da goteira gessada.

COMPOSIÇÃO • Confeccionada em tecido sintético resistente, fechos aderentes, barbatanas em duralumínio e passantes em metal.

PRECAUÇÕES • Verificar sempre o tamanho correto • Utilizar sobre uma meia grossa • Ao colocar o imobilizador, o pé deve estar posicionado em 90°.

MODELO • Bilateral.

TAMANHOS • P • M • G.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO • Não usar produtos clorados • Usar escova macia • Não torcer • Secar à sombra.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO

MODO DE USAR

O imobilizador deve ser colocado no paciente por outra pessoa.

- 1 - Soltar todos os fechos aderentes;
- 2 - Retirar a lingueta com as barbatanas de metal;
- 3 - Abrir o imobilizador e colocar de forma que o calcanhar se encaixe no orifício. Apoiar o pé no chão;
- 4 - Moldar a lingueta à curvatura do "peito do pé", abrindo ou curvando as barbatanas de alumínio, se necessário;
- 5 - Fixar a lingueta usando o fecho aderente central;
- 6 - Passar os fechos aderentes por dentro dos passantes de metal e fechar de forma que fiquem firmes;
- 7 - Cruzar em "x" as tiras compridas aderentes pela frente do imobilizador e prender na parte de trás do calcanhar.



Fabricado por:
SALVAPÉ
Produtos Ortopédicos Ltda.
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ. 60.883.741/0005-13
Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada

☎ Atendimento ao Consumidor:
(11) 3346 4535

Copyright © 2006 SalvaPé

VALIDADE: Indeterminada. **GARANTIA:** Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos. **IMPORTANTE:** Este produto é de uso individual, vetado a sua reutilização por terceiros.

Registro ANVISA nº: 10222460034

Resp. Técnico:
Dra. Ilzete Baute - CRF-SP: 71.492

