

<b>PRODUTO MARCA:</b> BIO URINE <b>REGISTRO ANVISA:</b> 80192450002		<b>NOME TÉCNICO:</b> BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO	
<b>FABRICANTE:</b> MB INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA		<b>AFE:</b> 8.01924.5	
<b>CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - ANVISA</b>			
<b>MODELOS COMERCIAIS / APRESENTAÇÃO:</b>			
Bolsa coletora opaca e transparente, capacidade 2000ml, conector escalonado com ponto de coleta, tubo extensor flexível 1,20m com espiral, alça de sustentação resistente flexível, tira para deambulação, câmara de Pasteur flexível, válvula anti-refluxo tipo membrana, filtro de ar bacteriológico e hidrofóbico, tubo de saída com coldre protetor. <b>Obs.: Produto é isento de látex.</b>			
<b>Embalagem:</b> Individual em papel grau cirúrgico com filme plástico. <b>Acondicionamento:</b> Caixa Master com 50 unidades.			
<b>CLASSE DE RISCO:</b> II	<b>NCM:</b> 90189099	<b>PRODUTO ESTÉRIL</b>	<b>MÉTODO:</b> ÓXIDO DE ETILENO
<b>COMPOSIÇÃO: PARTES COMPONENTES E MATÉRIA PRIMA</b>			
<b>COMPONENTE</b>	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>MATÉRIA PRIMA</b>
Bolsa coletora	PVC	Tampa do conector	PVC
Conector com ponto de coleta	Polietileno	Borrachinha do ponto de coleta	Laprene
Tubo extensor	PVC	Pinça	Polipropileno
Alça de Sustentação	PVC	Tira para deambulação	PVC
Espiral	Polipropileno	Filtro de ar	Polietileno com membrana Teflon
Câmara de Pasteur	Polietileno	Coldre	PVC
Tubo de drenagem	PVC	Suporte da válvula	PVC
Válvula anti-refluxo	PVC		
<b>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:</b> O produto deverá ser armazenado em local livre de efeitos causados por agentes externos (chuva, sol e calor) temperatura 30°C - umidade 80%.			
<b>INSTRUÇÃO DE USO:</b>			
<b>Embalagem:</b> 1. Verificar os dizeres de rotulagem; 2. Verificar a integridade da embalagem; 3. Verificar a validade do produto; 4. Abrir a embalagem conforme técnica de pétala.			
<b>Produto:</b> 1. Fechar pinça do tubo extensor e tubo de saída; 2. Retirar tampa do conector; 3. Adaptar o conector a sonda instalada no paciente; 4. Abrir pinça do tubo extensor; 5. Para esvaziar a bolsa, abrir pinça do tubo de saída.			
<b>INDICAÇÃO FINALIDADE:</b> Indicado para procedimentos clínicos ou cirúrgicos para coleta e aferição da drenagem urinária.			

**Site:** www.medicalbrasil.com.br

**E-mail:** sac@medicalbrasil.com.br

**Fone:** 81-3372.8686

**Em anexo Códigos EAN**

CÓDIGO EAN	DESCRIÇÃO
07898903447076	BIO URINE