

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRODUTO MARCA: BIO-COLLECTOR REGISTRO ANVISA: 80192459001		NOME TÉCNICO: BIO-COLLECTOR FRASCO COLETOR PARA DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA ABERTO	
FABRICANTE: MB INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA		AFE: 8.01924.5	
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - ANVISA			
MODELOS COMERCIAIS / APRESENTAÇÃO:			
Reservatório: 1200 ml/2000ml. Frasco coletor para drenagem urinária por sistema aberto, para coleta e aferição da drenagem urinária, atua por gravidade. O produto é constituído de frasco ligado a um tubo extensor que possui conector que é introduzido na sonda instalado no paciente ou no preservativo instalado no pênis do paciente. Obs: látex opcional.			
Embalagem: Individual em embalagem com filme plástico. Acondicionamento: Caixa Master com 50 unidades.			
CLASSE DE RISCO: II	NCM: 90189099	PRODUTO NÃO ESTÉRIL	MÉTODO: N/A
COMPOSIÇÃO: PARTES COMPONENTES E MATÉRIA PRIMA			
COMPONENTE	MATÉRIA PRIMA	COMPONENTE	MATÉRIA PRIMA
Frasco coletor	Polietileno de baixa densidade		
Tampa protetora	Polietileno de baixa densidade		
Conector Universal	PVC		
Tubo extensor	PVC		
Pinça ou clamp (corta-fluxo)	Polipropileno		
Dispositivo de fixação do tubo	Polietileno de baixa densidade		
Conector (opcional)	Látex		
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: O produto deverá ser armazenado em local livre de efeitos causados por agentes externos (chuva, sol e calor) à temperatura ambiente de 30°C e umidade relativa de 80%.			
INSTRUÇÃO DE USO: Embalagem: 1. Verificar a integridade do produto; 2. Abrir a embalagem; 3. Observar a validade do produto Produto: 1. Fechar pinça do tubo extensor e tubo de saída; 2. Retirar tampa do conector; 3. Adaptar o conector a sonda instalada no paciente; 4. Abrir pinça do tubo extensor; 5. Para esvaziamento do reservatório fechar a pinça do tubo extensor. Observações: 1. Para aferir o volume com precisão, utilizar cálice graduado; 2. O manuseio com paciente deve ser com a pinça do tubo fechada.			
INDICAÇÃO FINALIDADE: Indicado para procedimentos clínicos para coleta e aferição de urina por sistema aberto.			

Site: www.medicalbrasil.com.br

E-mail: sac@medicalbrasil.com.br

Fone: 81-3372.8686

Em anexo Código EAN

CÓDIGO EAN	DESCRIÇÃO
07898903447014	BIO COLLECTOR 1200 ML
07898526463309	BIO COLLECTOR 2000 ML