

BALDE – AÇO INOXIDÁVEL

Balde



Balde com Tampa

1 DESCRIÇÃO

É um produto de apoio com múltiplas finalidades utilizado na rotina diária dos serviços de saúde. Permite a acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas durante a realização de procedimentos. Fabricado em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, química e térmica, possibilitando a esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclaves).

2 INDICAÇÃO

Coleta, transporte e descarte de substâncias líquidas (soluções) e sólidas em procedimentos cirúrgicos ou na unidade de internação, como água para banho de leito, coletar resíduos de materiais utilizados durante curativos, embalagens abertas durante procedimentos cirúrgicos, etc....

3 INSTRUÇÕES DE USO

- **Antes do 1º uso e nos usos subsequentes.**
 - **Limpeza Manual**
 1. Utilizar detergente de uso hospitalar;
 2. Friccionar as superfícies internas e externas do recipiente com esponjas ou escovas não abrasiva;
 3. Enxaguar com água corrente potável até a completa remoção dos resíduos de detergente;
 4. Secar as superfícies interna e externa com um produto absorvente limpo e seco, que não solte partículas ou por meio de secadora automatizada com ar quente;
 5. Realizar a desinfecção da superfície interna e externa com álcool líquido a 70%, quando a indicação de uso é para procedimentos não críticos;
 6. Acondicionar em sistema de embalagem flexível transparente própria para produtos que passaram pelo processo de desinfecção;
 7. Identificar com etiqueta contendo minimamente as informações determinadas pela RDC nº 15 de março de 2012 da ANVISA.
 - **Limpeza e desinfecção automatizada** – pode ser realizada em:
 - Lavadora termodesinfetadora:

- Posicionar o balde em suporte apropriado ou em cestos com a parte convexa para baixo de forma que durante o ciclo de limpeza e desinfecção a água não fique acumulada dentro do recipiente;
 - Realizar o ciclo de limpeza e desinfecção conforme programa específico do equipamento;
 - Complementar a secagem das superfícies interna e externa se necessário com produto absorvente limpo que não solte partículas ou em secadora automatizada com ar quente;
 - Acondicionar em sistema de embalagem flexível transparente própria para produtos que passaram pelo processo de desinfecção;
 - Identificar com etiqueta contendo minimamente as informações determinadas pela RDC nº 15 de março de 2012 da ANVISA.
- Sistema de Limpeza a Vapor (Steamer)
 - Aplicar o jato de vapor sobre as superfícies interna e externa;
 - Secar as superfícies interna e externa do balde com um produto absorvente, limpo e que não solte partículas ou em secadora automatizada com ar quente;
 - Realizar uma desinfecção com álcool líquido a 70% quando a indicação de uso é para procedimentos não críticos;
 - Acondicionar em sistema de embalagem flexível transparente própria para produtos que passaram pelo processo de desinfecção;
 - Identificar com etiqueta contendo minimamente as informações determinadas pela RDC nº 15 de março de 2012 da ANVISA.
- **Nota:** Não utilizar produtos químicos corrosivos, soluções salinas e cloradas, essas substâncias podem favorecer o aparecimento de manchas, pitting e corrosão.
 - Detergentes: utilize somente produtos recomendados (enzimático, alcalino ou neutro), com diluição, temperatura e tempo de exposição de acordo com as instruções de uso do fabricante do produto.
 - Utilizar Água potável livre de resíduos orgânicos e inorgânicos.
 - Não armazenar produtos pesados sobre a tampa e o tambor.
 - O fabricante do produto não se responsabiliza pelo uso indevido ou não recomendado.

4 ESTERILIZAÇÃO

- Esterilização por vapor saturado sob pressão a 121°C por 15 minutos ou 134°C por 4 minutos, de acordo com o programa da autoclave;
- Este produto é passível de esterilização por processos a baixa temperatura.

5 ACONDICIONAMENTO

No almoxarifado: manter acondicionado em embalagem plástica transparente, com a identificação do produto contendo: código do produto, nome do produto, data de fabricação, data de validade, número do lote e nome do fabricante. Armazenar em local limpo e seco em armários fechados protegidos de poeira.

No CME do Serviço de Saúde: A identificação e o armazenamento devem atender as recomendações da ANVISA na RDC Nº 15, de 15 de março de 2012 nos artigos n.º 85 e 58 a 61.

6 PRECAUÇÃO

O balde deve ser utilizada somente para a função para qual foi projetada, pois, o uso indevido pode colocar em risco os pacientes, profissionais ou danificar o produto.

Nota: o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Ver garantia.

7 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	Econox
Balde	Ø 18 x 21 cm 5L	1 unidade	141.004
Balde	Ø 29 x 25 cm 10L	1 unidade	141.010
Tampa para balde	Ø 29 cm 10L	1 unidade	141.110
Balde	Ø 30 x 32 cm 15L	1 unidade	141.015
Tampa para balde	Ø 30 cm 15L	1 unidade	141.115
Balde com pedal	Ø 27 x 35 cm 20L	1 unidade	888.020
Balde com pedal frontal e balde plástico	Ø 20 x 31 cm 5L	1 unidade	888.105
Balde com pedal frontal e balde	Ø 25 x 38 cm 12L	1 unidade	888.112

ANVISA: O balde não se enquadra na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passível de cadastro na ANVISA.

CNPJ: 59.293.662/0001-40 | **T.Resp.:** W.Pesinato **CREA:** 140949 | regulatorio@fami.com.br