

Manual de Instruções



olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Estetoscópio Duoclinic Mikatos®



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

FINALIDADE

O Estetoscópio Duoclinic Mikatos® com Ausculta Dupla é indicado para ausculta cárdio pulmonar. Composto por auscultador duplo, possibilitando uma ausculta apurada em adultos e crianças. O diafragma elaborado de material plástico (PVC) o lado maior é geralmente utilizado para pacientes adultos. O sino de menor diâmetro é mais adequado para pacientes infantil (pediátrico) ou recém nato (neonatal).


No momento em que estiver manuseando o Estetoscópio o profissional precisa abrir o lado que pretende usar (campânula ou diafragma) girando o auscultador.

Opera na frequência audível de 20 a 500 Hz (Hertz) e intensidade sonora de 30 dbA (Decibel na escala A





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

01

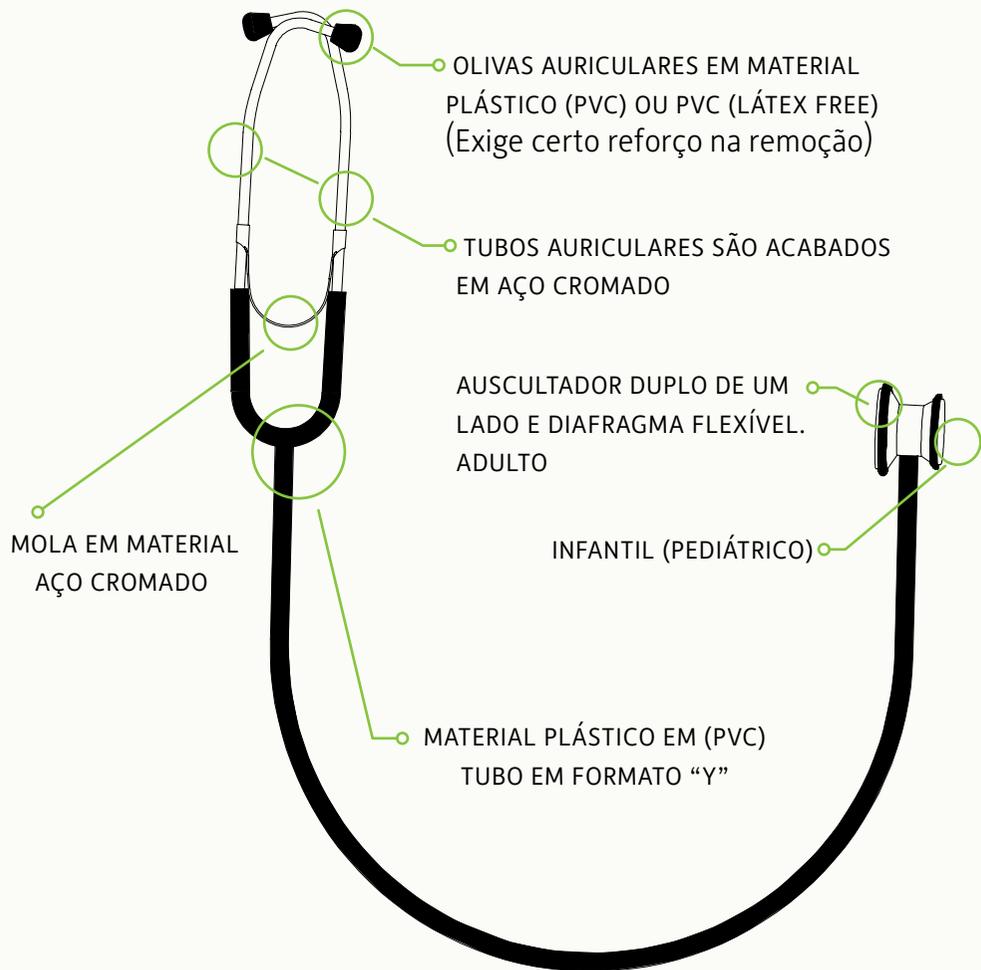

Componentes do produto

Estetoscópio Duoclinic (duplo)

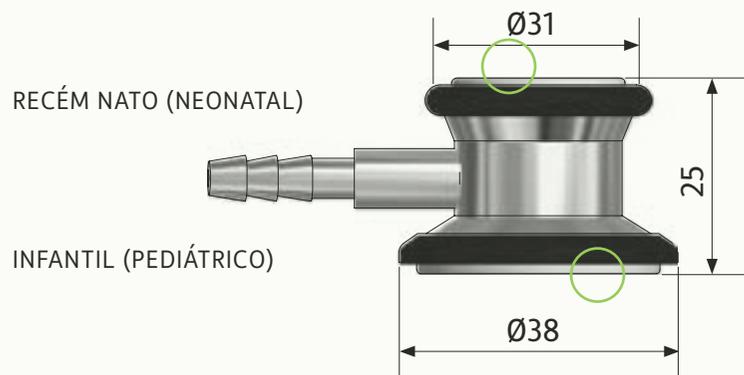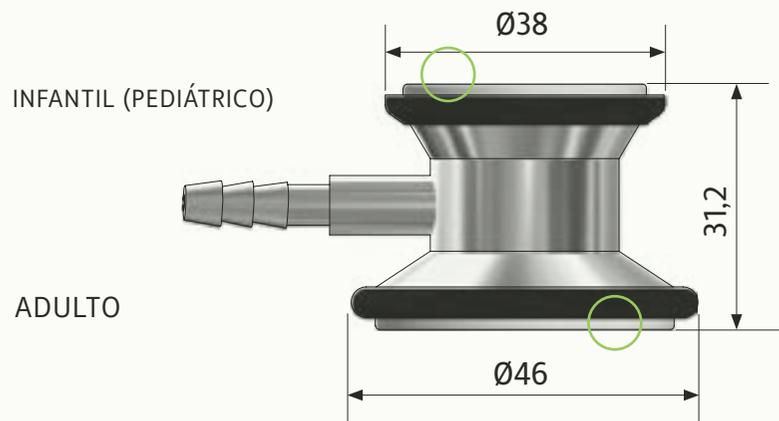

Dimensões Gerais do Duoscopic Missouri

COMPONENTES

- ✓ 01. ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL (PEDIÁTRICO) - (LADO MAIOR GERALMENTE UTILIZADO PARA ADULTOS E O MENOR DIÂMETRO É MAIS ADEQUADO PARA INFANTIL (PEDIÁTRICO) OU RÉCEM NATO (NEONATAL))

OPCIONAL: ESTETOSCÓPIO DUPLO INFANTIL (PEDIÁTRICO) E RÉCEM NATO (NEONATAL)

- ✓ 01. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA

- ✓ 01. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO MICROONDULADO

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos.

A validade é determinada pelo funcionamento deles e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Todos os componentes do Estetoscópio Duoclinic Mikatos® pode ser limpo usando-se um pano macio umedecido com água pura e sabão neutro, ou um lenço de papel umedecido com Álcool Etílico Hidratado ou Absoluto (100% puro). As olivas podem ser removidas dos tubos auriculares para uma limpeza completa. Para sua segurança e funcionalidade, certifique-se de que as olivas estão firmemente encaixadas nas hastes do Estetoscópio. No atendimento a cada paciente, o diafragma e o auscultador podem ser limpos com Álcool, secando todas as peças após a limpeza, antes de usá-lo.

orientações de cuidado e limpeza



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Fazer periodicamente uma limpeza de rotina para assegurar e prolongar a vida do estetoscópio

Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho

Não é recomendado expor o estetoscópio à temperaturas extremas (altas ou baixas)

A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem trazer prejuízos ao profissional e ao paciente

ARMAZENAMENTO

Para preservar o aparelho contra a deteriorização, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, da umidade e das intempéries atmosféricas

orientações de cuidado e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra falha material e de produção, pelo prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente/usuário.

O aparelho tem Garantia de **01 ano** contra defeitos de fabricação e desgaste natural. Estão **cobertas** pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO - ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE **ANVISA - M.S: N° 80218930011**
VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS

