

Manual de Instruções



olá, somos Mikatos®

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Estetoscópio Auscultensível em Aço Inox Missouri®

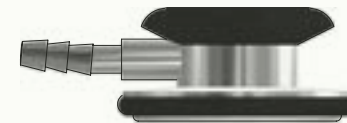


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA


FINALIDADE

O Estetoscópio Auscussensível em Aço Inox Missouri® é indicado para a ausculta dos sons provenientes da respiração e dos batimentos cardíacos do paciente. Os sons são captados pelo diafragma, amplificados pelo auscultador através do tubo de condução em formato “Y” e transferidos para os biauriculares.


O aparelho é composto de conjunto auscultador com: biauricular, tubo em formato “Y” (para condução do som) corpo do auscultador e olivas para encosto no ouvido do profissional. Todos esses componentes podem ser adquiridos separadamente para troca eventual.



ADULTO

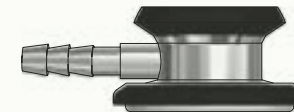


INFANTIL
(PEDIÁTRICO)

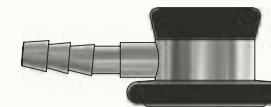

NEONATAL
(RÉCEM-NASCIDO)

01

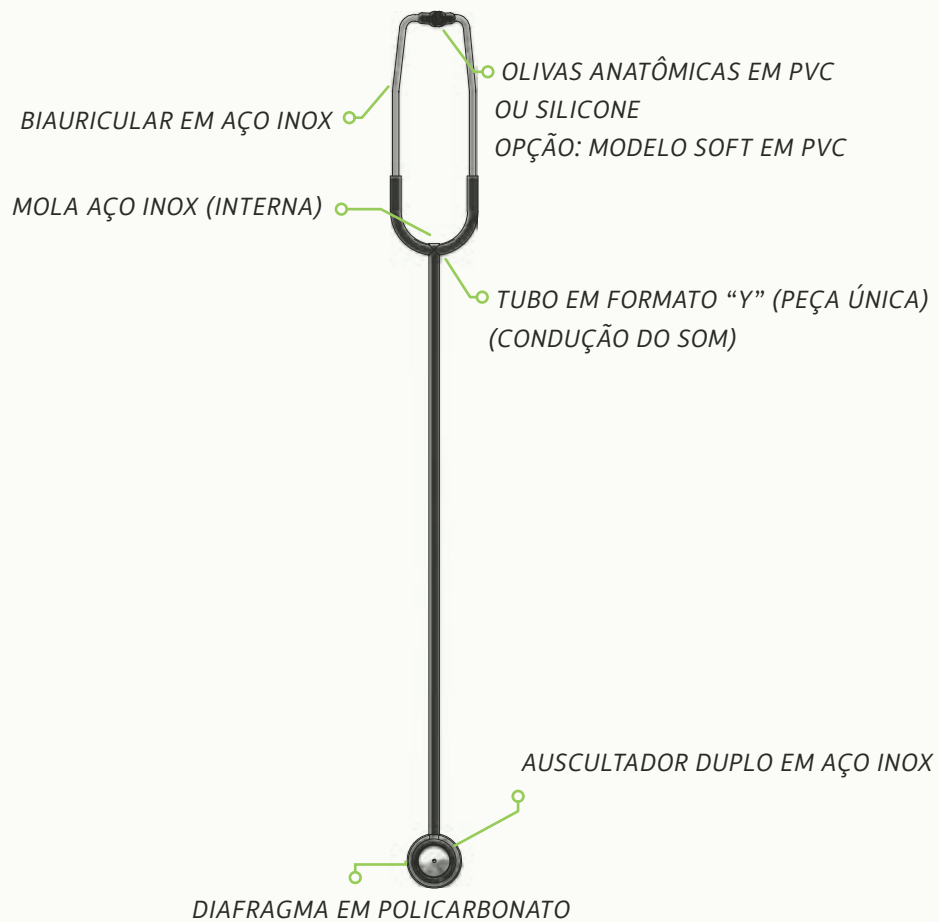


Componentes do produto


Estetoscópio Auscussensível em Aço Inox

02


ADULTO

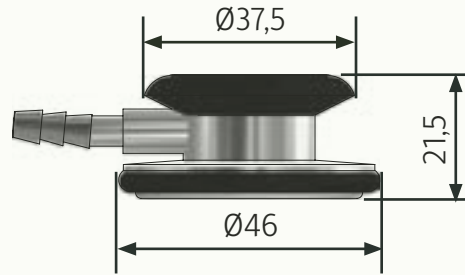

INFANTIL
(PEDIÁTRICO)

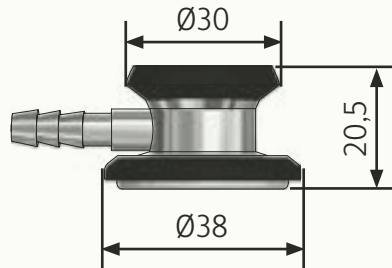

NEONATAL
(RÉCEM-NASCIDO)

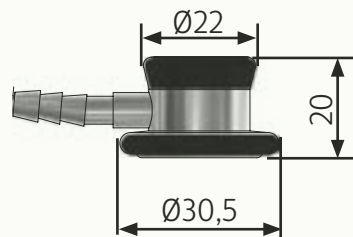

Dimensões Gerais do Estetoscópio Auscultável em Aço Inox

COMPONENTES



01 - AUSCULSENSIVEL EM AÇO INOX MISSOURI



01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA



01 - EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO MICROONDULADO

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos.

A validade é determinada pelo funcionamento deles e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Todos os componentes do Estetoscópio Auscussensível Missouri® podem ser limpos usando-se um pano macio umedecido com água e sabão neutro, ou um lenço de papel umedecido com Álcool Hidratado ou Absolutto (100%puro). As olivas podem ser removidas dos tubos auriculares para uma limpeza completa . Para sua segurança e funcionalidade, certifique-se de que as olivas estão firmemente encaixadas nas hastes do Estetoscópio. No atendimento a cada paciente, o diafragma e o auscultador podem ser limpos com álcool isopropílico, seque todas as peças após a limpeza, antes de usá-lo.

Orientações para cuidados e limpeza



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Faça periodicamente uma limpeza de rotina para assegurar e prolongar a vida do estetoscópio

Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho

Não é recomendado expor o Estetoscópio à temperaturas extremas (altas ou baixas)

A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem trazer prejuízos ao profissional e ao paciente

ARMAZENAMENTO

Para preservar o aparelho contra a deteriorização, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, da umidade e das intempéries atmosféricas

Orientações para cuidados e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra falha material e de produção, pelo prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente/usuário.

O aparelho tem Garantia de **01 ano** contra defeitos de fabricação e desgaste natural. Estão **cobertas** pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material.

A Garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO - ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1

REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - M.S: N° 80218930004

VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS

