

RELATÓRIO TÉCNICO

Pulseira de Identificação Health-Med

Página

1 de 2

Nome do Produto: Pulseira de Identificação Health-Med

Marca do Produto: Health-Med

Origem do Produto: Brasil

Descrição: A pulseira de IDENTIFICAÇÃO é fabricada em plástico macio e resistente, nas apresentações:

1. Pulseiras plásticas identificadoras Adulto.
2. Pulseiras plásticas identificadoras Infantis.
3. Pulseira Plástica Identificadora Slim colorida.
4. Pulseiras plásticas identificadoras (mãe e filho), numeradas.
5. Pulseira de identificação Mãe e Filhos (Gêmeos), numeradas.

Composição: 100% Laminado de Polivinil colorida.

Indicação: Identificação e controle de pacientes ou outros usuários em maternidades, hospitais, festas, clubes, feiras e outros eventos em recintos controlados.

Instruções de uso:

1. Escrever o nome do usuário.
2. Ajustar a pulseira posicionando o botão lacre.
3. Eliminar o excesso haste dobrando para trás antes de lacrar.
4. Cortar o excesso com o uso de uma tesoura.

Precauções:

- As instruções devem ser lidas com atenção antes do uso do produto.
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida.
- Checar a integridade da embalagem, não utilizar se estiver molhada, violada ou danificada.

Advertências:

O produto não deve ser utilizado para outros fins que não aqueles recomendados pelo fabricante;

O procedimento de descarte do produto deve ser adotado pelas unidades de saúde, hospitais, clínicas entre outros, respeitando a legislação sanitária vigente para descarte de resíduos hospitalares.

Na manipulação desse produto os cuidados para que o procedimento seja realizado de forma asséptica devem ser tomados.

Armazenamento e transporte:

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça é fundamental que sejam tomados todos os cuidados durante o transporte e armazenagem.

RELATÓRIO TÉCNICO

Pulseira de Identificação Health-Med

Página

2 de 2

Apresentação:

O produto apresenta-se para comercialização em 5 modelos padrão.

São embaladas da seguinte forma:

- Embalagem Primária: Embalada em saco plástico, com 100 unidades (Adulto, infantil e Slim), com 50 unidades (Mãe e filho e Mãe e gêmeos).
- Embalagem Secundária: Embaladas em caixa de papel cartão tipo duplex,contendo 500 unidades 500 unidades (Adulto, infantil e Slim) e 250 unidades (Mãe e filho e Mãe e gêmeos).Todas as embalagens recebem dados de rotulagem de acordo com a RDC 185.

Fluxograma de fabricação:

Entrada de Matéria – Prima → Armazenagem → Solda Eletrônica → Injeção dos botões invioláveis→ Montagem dos Componentes →Inspeção e Controle de Qualidade → Embalagem →inspeção do Lote por amostragem →Aprovação →Expedição.

Fabricante:Health-Med Industria e Comércio de Artigos Hospitalares Ltda-ME.