



## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: TEGADERM STANDARD (1622W; 1624W; 1626W; 1627)

### Descrição

O **Curativo Transparente Tegaderm 3M** consiste de um filme delgado com adesivo hipoalergênico resistente à água. O curativo é estéril, transparente e permeável ao oxigênio e ao vapor úmido. O curativo intacto é impermeável a líquidos e bactérias. O Curativo não contém látex.

### Composição

Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico resistente à água.

### Considerações ambientais

O produto não apresenta risco de contaminação ambiental quando descartado. A caixa externa do produto é manufaturada de material reciclável.

### Indicações de Uso

- ✓ Curativos para feridas provocadas por dermo-abrasão, úlceras de pressão superficiais, sobre crostas das feridas para facilitar o desbridamento por autólise, sobre áreas doadoras de enxerto e em queimaduras de primeiro e segundo graus.
- ✓ Proteção para prevenir injúrias de pele causadas por atrito ou exposição contínua à umidade.
- ✓ Curativo sobre feridas cirúrgicas limpas e fechadas.

**Obs:** O uso de qualquer curativo, incluindo o **Curativo Transparente Tegaderm**, deve fazer parte de um protocolo bem definido para tratamento e prevenção de lesões de pele.

### Contra indicações

O curativo Tegaderm não é indicado para aplicação sobre cateteres ou feridas infectadas.

Este produto não está indicado, e não pode ser vendido, para outras aplicações além das indicadas.

- ✓ O curativo Tegaderm não é indicado para substituir suturas ou outros métodos de suturas para cicatrização por primeira intenção.
- ✓ Troque o curativo seguindo o protocolo hospitalar, ou se ele não estiver intacto (um curativo intacto é aquele que foi aplicado corretamente para conseguir e manter boa adesão pelo menos ao redor de todo o curativo). Para melhores resultados, o curativo deve ser grande o suficiente para oferecer uma boa margem de adesão à pele saudável e seca ao redor do ponto de inserção do cateter ou ferida.
- ✓ Se o curativo for perfurado por suturas ou outros dispositivos, ou se não estiver intacto, as propriedades de barreira protetora estarão comprometidas. Ferida com exsudato em excesso pode causar a não-aderência do curativo; troque o curativo se isso ocorrer.
- ✓ Foliculites ocasionais sob o filme do curativo têm sido relatadas em literatura.
- ✓ O local deve ser observado freqüentemente quanto à presença de sinais de infecção; se a infecção ocorrer o que pode ser sinalizado por febre, dor, hiperemia, edema, odor estranho ou secreção) remova o curativo e adote as precauções padronizadas; neste caso, o uso do curativo Tegaderm deve ser descontinuado ou o mesmo deverá ser trocado com maior freqüência em conjunto com apropriada intervenção médica.
- ✓ Cuidados devem ser tomados na remoção do curativo para evitar possíveis traumas de pele.
- ✓ Se o curativo aderir à superfície seca do ferimento onde a epitelização estiver ocorrendo, este deve ser levemente umedecido.

### Precauções:

- ✓ A hemostasia do local do cateter ou ferida deve ser obtida antes de se aplicar o curativo.

- ✓ A pele deve estar seca e livre de resíduos detergentes para precauções padronizadas; neste caso, o uso do curativo Tegaderm deve ser descontinuado ou o mesmo deverá ser trocado com maior frequência em conjunto com apropriada intervenção médica.

## Aplicação

Verificar se a pele está limpa, livre de resíduos, e seca.

1. Abrir a embalagem e remover o curativo estéril.
2. Remover o liner.
3. Posicionar o curativo sobre o local do cateter ou ferida.
4. Remover a moldura de papel ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo. Envolver totalmente a conexão do cateter com o curativo, de modo a selar com segurança o acesso ao ponto de inserção. Fixe novamente todo o curativo com as pontas dos dedos através de movimentos do centro para as bordas.

**NÃO APLICAR O PRODUTO SOB TENSÃO.**

## Remoção

Para remover o curativo levante uma das pontas do mesmo. Posicione uma das mãos sob o curativo para dar suporte a pele.

Tracionar cuidadosamente o curativo paralelamente a pele no sentido do crescimento dos pelos.

Para levantamento de uma das bordas do curativo para facilitar a retirada, pode ser aplicado óleo mineral.

## Estocagem

Os curativos estéreis são fornecidos em embalagens individuais e acondicionados em caixas. A esterilidade do curativo é garantida a menos que sua embalagem individual sofra danos ou seja aberta. Estocar em temperatura ambiente (15° - 30° C) . Evitar calor e umidade excessivos.

## Apresentação do Produto

<i>Tamanho</i>	<i>Código do Produto</i>	<i>Caixa</i>
4.4CMX4.4CM	1622W	Caixa com 100
6.0CMX7.0CM	1624W	Caixa com 100
10.0CMX12.0CM	1626W	Caixa com 50
10.0CMX25.0CM	1627	Caixa com 20

## Validade

A validade está impressa na embalagem do produto.

**3M DO BRASIL**

**MEDICAL DIVISION C3SD (CRITICAL & CHONIC CARE SOLUTIONS DIVISION)**

Email: [3msolucoesparaenfermagem@mmm.com](mailto:3msolucoesparaenfermagem@mmm.com)

Fale com a 3m: 0800 0132333