

CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO SONDA

FINALIDADE: Inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração e/ou com perturbações no transporte de oxigênio.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico. Apresenta ponta fechada e quatro orifícios alternados em lados opostos nas laterais no lado proximal do tubo e conector no lado distal do mesmo. A embalagem em papel grau cirúrgico apresenta esterilização a gás óxido de etileno e a embalagem plástica apresenta esterilização a raio gama. Medidas: 40 cm de comprimento nos tamanhos 4, 6, 8, 10 e 12.

INSTRUÇÃO DE USO:

Abrir a embalagem, após a verificação da sua integridade. Introduzir delicadamente o cateter pela narina do paciente. Iniciar a oxigenoterapia.


PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO: Artigo médico hospitalar de uso único. Produto estéril. O produto só pode ser instalado por profissional habilitado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação. Borbulhar o oxigênio em água para umedecer o mesmo, evitando desta forma o ressecamento das mucosas nasais. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com o prazo de validade vencido. Armazenar a embalagem em local limpo a seco ao abrigo da luz. Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente, de acordo com a finalidade de uso.

ARMAZENAMENTO: armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação

TRANSPORTE: transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação

REGISTRO ANVISA: 10014160031

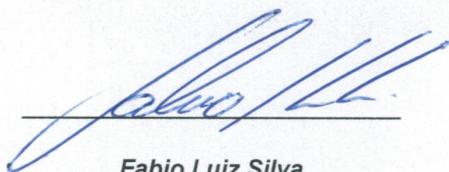

Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP – 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.