

CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS

FINALIDADE: Utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração e/ou com perturbações no transporte de oxigênio.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico. Possui hastes tipo óculos, narina em PVC e um conector universal de fácil adaptação. A embalagem em papel grau cirúrgico apresenta esterilização a gás óxido de etileno, e a embalagem plástica apresenta esterilização a raio gama.

INSTRUÇÃO DE USO:

Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto. Abrir asepticamente a embalagem antes da utilização do produto. Introduzir a narina no nariz do paciente e colocar as hastes atrás das orelhas, ajustando-as corretamente. Adaptar o conector em uma extensão para oxigênio. Esta extensão possui em suas extremidades uma conexão apropriada sendo que, uma deve ser adaptada ao conector do cateter e a outra deve ser conectada a fonte de oxigênio. Iniciar a oxigenoterapia.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO: Artigo médico hospitalar de uso único. Produto estéril. O produto só pode ser instalado por profissional habilitado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação. Borbulhar o oxigênio em água para umedecer o mesmo evitando assim, o ressecamento das mucosas nasais. Recomenda-se que o cateter para oxigênio tipo óculos seja submetido a um teste antes de ser instalado no nariz do paciente. O teste é realizado colocando o produto na fonte de oxigênio verificando se o mesmo permite a vazão do oxigênio pela narina do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver aberta, danificada, ou com o prazo de validade vencido. Armazenar em local limpo, fresco e ao abrigo de luz e da umidade, à temperatura ambiente. Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados. O produto pode causar efeitos indesejáveis se as hastes do cateter não forem bem ajustadas não ficando na posição correta junto ao nariz do paciente.

ARMAZENAMENTO: armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

TRANSPORTE: transportar em local limpo, fresco, seco, arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

REGISTRO ANVISA: 10014169011

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação.


Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP – 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira
Rua Vieira Portuense, 760 – Jardim Oriental - CEP: 04347-080 – São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br