

**PORTA-ALGODÃO – AÇO INOXIDÁVEL**

Porta Algodão Servido



Porta Algodão com Mola



Porta Algodão

**1 DESCRIÇÃO**

É um produto de apoio fabricado em aço inoxidável 304, resistente à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando altas e baixas temperaturas. Disponível em diversos tamanhos.

**2 INDICAÇÃO**

Indicado para armazenar algodão limpo para uso imediato ou após o uso para descarte.

**3 INSTRUÇÕES DE USO****➤ Antes do 1º uso****▪ Limpeza Manual**

1. Remover a tampa do recipiente;
2. Utilizar detergente de uso hospitalar;
3. Friccionar o interior do recipiente e a tampa com esponjas ou escovas não abrasivas;
4. Enxaguar com água corrente potável até a completa remoção dos resíduos de detergente;
5. Secar o recipiente e a tampa interna e externamente com um material absorvente limpo e seco, que não solte partículas ou por meio de secadora automatizada com ar quente;
6. Realizar a desinfecção da superfície interna e externa com álcool líquido a 70%.

**➤ Em uso (rotina)**

1. Remover a tampa do recipiente;
2. Desprezar o conteúdo (algodões usados) em lixo infectante;
3. Repetir os passos nº 3, 4, 5, 6 e 7 descritos no processo de limpeza manual.

**Nota:**

- Não utilizar produtos químicos corrosivos, soluções salinas e cloradas, essas substâncias podem favorecer o aparecimento de manchas, pitting e corrosão;
- Utilizar Água potável livre de resíduos orgânicos e inorgânicos;
- Não armazenar produtos pesados sobre o porta-algodão;
- O fabricante do produto não se responsabiliza pelo uso indevido ou não recomendado.

**Esterilização**

**Nota:** por se tratar de um produto não crítico, não existe recomendação de esterilizar, no entanto caso necessário, esterilizar de acordo com a necessidade ou protocolo do serviço de saúde.

## ➤ Compatibilidade aos agentes esterilizantes

Tipo de Embalagem	Vapor Saturado Sob Pressão	Calor Seco	Óxido de Etileno	Plasma de Peróxido de Hidrogênio	Vapor a Baixa Temperatura de Formaldeído
Porta Algodão Servido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta Algodão com Mola	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta Algodão*	Sim*	Sim	Sim	Sim	Sim

\* Necessita processar destampado.

- Esterilização por vapor saturado sob pressão – 121° C por 15 minutos ou 134° C por 4 minutos.
- Esterilização a baixas temperaturas – Formaldeído, Peróxido de Hidrogênio e Óxido de Etileno – observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave.

**ARMAZENAMENTO****No almoxarifado:**

Manter em embalagem plástica transparente, identificar o produto com etiqueta contendo: código do produto, nome do produto, data de fabricação, data de validade, número do lote e nome do fabricante. Armazenar em local limpo e seco e protegidos de poeira.

**No Serviço de Saúde:** Após o processo de limpeza, secagem e desinfecção ou esterilização se necessário conforme descrito. No caso de esterilização recomenda-se o uso de um sistema de barreira estéril flexível de acordo com o método de esterilização em: Papel Crepado, Papel Grau Cirúrgico, SMS, Algodão. A identificação e o armazenamento devem atender as recomendações da ANVISA na RDC Nº 15, de 15 de março de 2012 nos artigos n.º 85 e 58 a 61.

**5 PRECAUÇÃO**

O porta-algodão deve ser utilizado somente para a função para a qual foi projetado, pois, o uso indevido compromete a segurança dos pacientes, dos profissionais e a integridade e funcionalidade do produto.

**Nota:** o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Ver garantia.

**7 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓDIGOS
			Econox
Porta Algodão, servido	Ø 8 x 8 cm	1 unidade	120.015
Porta Algodão, com mola	Ø 8 x 8 cm	1 unidade	120.016
Porta Algodão	Ø 10 x 10 cm	1 unidade	120.020
Porta Algodão	Ø 12 x 12 cm	1 unidade	120.024
Porta Algodão	Ø 14 x 14 cm	1 unidade	120.028

**ANVISA:** O porta-algodão não se enquadra na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passível de cadastro na ANVISA.

**CNPJ:** 59.293.662/0001-40 | **T.Resp.:** W.Pesinato **CREA:** 140949 | [regulatorio@fami.com.br](mailto:regulatorio@fami.com.br)