

**SONDA GÁSTRICA LEVINE**

**FINALIDADE:** Utilizado em crianças para confirmar a permeabilidade da porção superior do aparelho digestivo e em adultos para sucção ou alimentação enteral conectada ao respectivo equipamento.

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:** Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico. Apresenta ponta aberta com dois a quatro orifícios (dependendo da numeração) no lado proximal do tubo e conector com tampa no lado distal até a numeração 20. A numeração 22 apresenta conector no lado distal. A embalagem em papel grau cirúrgico apresenta esterilização a gás óxido de etileno, e a embalagem plástica apresenta esterilização a raio gama. **Medidas:**

Nº	DIAMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	Nº	DIAMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
4	1,35mm	1,00 m	14	4,70mm	1,20 m
6	2,0mm	1,00 m	16	5,30mm	1,20 m
8	2,7mm	1,20 m	18	6,00mm	1,20 m
10	3,3mm	1,20 m	20	6,70mm	1,20 m
12	4,0mm	1,20 m	22	7,30mm	1,20 m

**INSTRUÇÃO DE USO:** Abrir a embalagem, após a verificação de sua integridade. Colocar luvas estéreis. Deitar o paciente de modo que a cabeça fique inclinada para trás, porém o pescoço deve estar direcionado para frente. Umedecer a sonda com lubrificante estéril e introduzir através da narina; à medida que a mesma penetrar na nasofaringe, solicitar ao paciente que exteriorize a língua. Com a outra mão segurar a língua com uma gaze e tracionar. Quando o paciente inspirar introduzir rapidamente no esôfago. A sonda deve deslizar para dentro do esôfago sem oferecer nenhuma resistência. Se entrar equivocadamente na traqueia, o paciente engasga e regurgita a ponta proximal da sonda através da boca. Caso isso ocorra, puxar a sonda de volta e repetir o procedimento. Quando a sonda estiver no esôfago consegue-se movimentar a mesma facilmente. Com a sonda posicionada, iniciar a alimentação enteral. Ao final do procedimento retirar a sonda delicadamente.


**PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:** Artigo hospitalar de uso único. Produto estéril. O produto só pode ser instalado por profissional habilitado. A técnica de instalação faz parte da sua área de atuação. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com prazo de validade vencido. Armazenar a embalagem em local limpo, seco, e ao abrigo de luz. Destruir após uso, descartando em local próprio para materiais contaminados. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação

**TRANSPORTE:** transportar em local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

**REGISTRO ANVISA:** 10014160010

**VALIDADE:** 3 anos a partir da data de fabricação.



Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP 3940

**Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.**

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira  
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263  
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br