

SONDA NASOGÁSTRICA

FINALIDADE: Utilizada para administração de dieta enteral em pacientes que não conseguem se alimentar.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, transparente e flexível. É formada por um tubo e um conector. Para a sua descrição consideramos a ponta da sonda que penetra no paciente como proximal e a ponta que possui conector como distal. **TUBO:** apresenta-se fechado na extremidade proximal e dois furos em paredes opostas elaboradas para não ferir a mucosa. **CONNECTOR:** Componente que permite a ligação do tubo a uma bomba de nutrição enteral. A conexão é do tipo luer fêmea. O comprimento é de 40 cm e os diâmetros variam de 4 a 12. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e apresenta esterilização a gás óxido de etileno, e a embalagem plástica para a esterilização a raio gama. **Medidas:**

Nº	DIAMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
4	1,35 mm	40 cm
6	2,0mm	40 cm
8	2,7mm	40 cm
10	3,3mm	40 cm
12	4,0mm	40 cm

INSTRUÇÃO DE USO:

Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto; Calçar luvas descartáveis estéreis; O paciente deve estar em uma posição deitada ou semi-deitada. A cabeça deve ficar inclinada para trás, porém o pescoço deve estar posicionado para frente; Umedecer a sonda com lubrificante estéril e introduzir através de uma narina à medida que a mesma penetra na nasofaringe, solicitar ao paciente que exteriorize a língua, com a outra mão segurar a língua com uma gaze e tracionar. Quando o paciente inspirar, introduzir rapidamente no esôfago. A sonda deve deslizar rapidamente no esôfago sem oferecer nenhuma resistência. Se entrar equivocadamente na traqueia o paciente engasga e regurgita a ponta proximal da sonda através da boca. Caso isso ocorra retirar a sonda e repetir o procedimento. Quando a sonda está no esôfago consegue se movimentar a mesma facilmente. Com a sonda posicionada iniciar a alimentação enteral. Ao final do procedimento retirar a sonda de modo delicado.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO: Produto médico hospitalar de uso único; Destruir após o uso e descartar em local próprio para materiais contaminados; Produto estéril a óxido de etileno em embalagem de papel grau cirúrgico ou a raio gama em embalagem plástica; O produto somente poderá ser instalado por profissional habilitado; Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com o prazo de validade vencido; Armazenar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo da luz. O produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

ARMAZENAMENTO: armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação

TRANSPORTE: transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação.

REGISTRO ANVISA: 10014160009



Fábio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br