

### SONDA URETRAL

**FINALIDADE:** É indicada em pacientes que são incapazes de urinar ou por perda no pré-operatório de retorno do tônus da bexiga e também é utilizada para esvaziar a mesma durante o pré-operatório de cirurgias dos órgãos pélvicos.

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:** é um dispositivo fabricado em cloreto de polivinila (PVC) atóxico, transparente e flexível com uma das extremidades aberta e na outra, existe um conector luer que se adapta a seringa, para aspiração. O conector possui uma tampa especial acoplada. É apresentada nos diâmetros de 4 a 24 e comprimento de 40 cm cada uma. Embalado em papel grau cirúrgico quando esterilizado a óxido de etileno e embalagem plástica para esterilização a raio gama.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Verificar a integridade da embalagem unitária e o prazo de validade do produto; Introduzir delicadamente a sonda de acordo com o procedimento padronizado pela instituição de saúde. **Em homens:** Realizar uma assepsia do pênis, pode-se utilizar na extremidade da sonda um gel lubrificante; Não pressionar a seringa contra o meato externo da uretra, pois isso força o material da uretra para o interior da bexiga; Sabe-se que a sonda alcançou a bexiga pelo surgimento da urina através da sonda; Manter a sonda em sua posição até que não saia mais urina, mover a sonda e certificar-se que a drenagem foi completa; **Em mulheres:** Realizar assepsia da genitália; Pode-se utilizar na extremidade da sonda um gel lubrificante; Segurar a sonda com auxílio de uma pinça estéril e inserir delicadamente na uretra, a qual fica facilmente exposta quando os lábios da região são afastados; Avançar delicadamente com a sonda até a entrada da bexiga, o que é evidenciado pelo surgimento de urina.

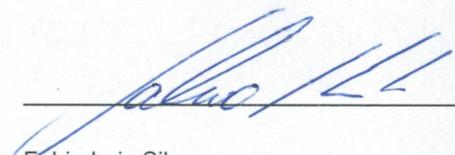
**PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:** Artigo médico hospitalar de uso único. Destruir após uso. Produto Estéril. Esterilizado por óxido de etileno ou Raio Gama. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido; Instalar a sonda no paciente apenas se absolutamente necessário, pois este procedimento pode ocasionar infecções no trato urinário, uma vez que a bexiga esteve super distendida e desta forma, apresenta uma baixa resistência e pode ser facilmente invadida por bactérias. Após o uso destruir e descartar em local para materiais potencialmente contaminados. Armazenar em local limpo, seco, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

**TRANSPORTE:** transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

**VALIDADE:** 3 anos a partir da data de fabricação.

**REGISTRO ANVISA:** 10014160012

  
\_\_\_\_\_  
Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP 3940

**Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.**

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira  
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263  
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br