



Bolsa Água Quente

Planilha de Dados

Código	Produto	Un.	% IPI	NCM	Cód. de Barras	Registro M.S	Padrão Grande	Padrão Pequena
ATR007	Bolsa Água quente 1 litro Tradicional	pç.	15%	40.14.90.10	7896788000072	10392370005	36	4
ATR008	Bolsa Água quente 2 litros Tradicional	pç.	15%	40.14.90.10	7896788000089	10392370005	36	4

Indicações:

Indicada para infecções, inflamações e relaxamento muscular. Reduz edemas, hematomas, espasmos musculares e evita o endurecimento das articulações. Aumenta a dilatação dos vasos, atuando diretamente no tratamento de inflamações, lesões musculares, dores na coluna e cólicas.

Características:

Fácil e prática.

Suas ranhuras distribuem o calor por igual.

Mantém a temperatura por mais tempo.

Modo de Usar:

- Antes de usar a Bolsa verifique se não há vazamentos, utilizando água em temperatura ambiente;
 - Leve a água ao fogo em um recipiente compatível;
 - Ao começar a ferver, desligue a chama e aguarde 1 minuto;
 - Retire a tampa e segure a Bolsa na posição vertical;
 - Apoie a Bolsa sobre uma superfície lisa para facilitar o enchimento;
 - Após encher, rosqueie a tampa;
- (Não deixe de verificar se há vazamentos primeiramente utilizando água em temperatura ambiente).
- Envolve a bolsa em uma toalha e aplique sobre a região desejada.

Cuidados:

- Aplique a compressa quente somente após a diminuição do inchaço;
- Nunca deite ou submeta a bolsa sob pressão excessiva, a fim de evitar possíveis acidentes;
- Não utilize a compressa quente quando houver qualquer tipo de doença de pele ou deficiência na circulação sanguínea;
- O uso por crianças deve ser supervisionado por um adulto.

Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, longe de materiais cortantes.

Modo de lavar:

- Após o uso retire toda a água e seque-a á sombra, longe do sol;
- Evite contatos com óleos, solventes e gordura;
- Nunca utilize outra substancia que não seja água no interior da bolsa.

Composição:

Borracha Natural e borracha sintética e cargas.

Dimensões do produto:

- Bolsa Água Quente 1 Litro - 18 x 25 cm (1.000 ml).
- Bolsa Água Quente 2 Litros - 20 x 30 cm (2.000 ml).

Validade:

3 anos.

Responsável Técnica: Fabiane Tavares de Souza **CRFSP:** 91809