



Ducha Ginecológica

Planilha de Dados

Código	Produto	Un.	% IPI	NCM	Cód. De barras	Registro M.S	Padrão Grande	Padrão Pequena
ARO001	Ducha Ginecológica N° 10 Rosa	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788010019	10392370009	15	3
ATR001	Ducha Ginecológica N° 10 Tradicional	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788000010	10392370009	15	3
ARO002	Ducha Ginecológica N° 12 Rosa	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788010033	10392370009	15	3
ATR002	Ducha Ginecológica N° 12 Tradicional	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788000034	10392370009	15	3
ARO003	Ducha Ginecológica N° 14 Rosa	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788010057	10392370009	15	3
ATR003	Ducha Ginecológica N° 14 Tradicional	Pç.	0%	90.18.39.21	7896788000058	10392370009	15	3

Indicação:

Conforme orientação médica, como: lavagem vaginal, pulverização lubrificante, lavagem intestinal.

Características:

É um produto versátil e resistente que proporciona conforto e segurança.

Instruções de Higienização:


- Coloque o produto desmontado em uma vasilha e jogue água quente sobre o mesmo. Deixe por alguns minutos.
- Retire a pera e aperte algumas vezes para retirar toda água de seu interior.
- Seque os componentes com uma toalha limpa;
- Outras opções de higienização: Lavar com água e sabão; limpar com álcool 70% e enxaguar bem.

Cuidados:

- Higienize a ducha antes e após o uso, jogando água quente sobre o conjunto;
- Guarde o produto em lugar seco, longe dos raios solares.
- Ao lavar, retire toda a água de seu interior e não utilize produtos químicos;
- Não deixe ao alcance de crianças;

Modo de Usar:

Antes da utilização, faça a limpeza de acordo com as instruções de higienização.

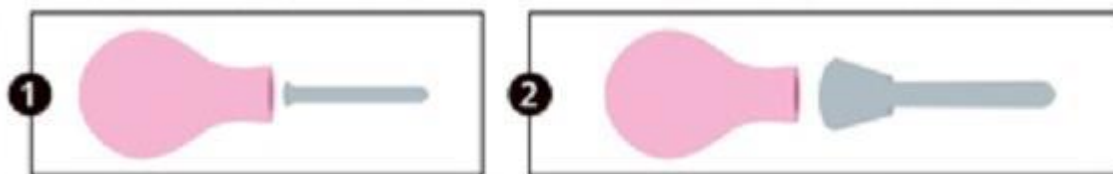

- Conjunto e montagem: Pera de PVC, cânula vaginal (maior), cânula retal (menor). Encaixe uma das duas cânulas fazendo pressão manual;
- Higienizar todo o conjunto externamente com água quente, jogando sobre o conjunto (não mergulhar em água fervendo);
- Com a ducha pronta para uso, aspire água quente com a ponta da mesma, comprimindo a pera e descomprimindo, por aproximadamente 3 vezes, descartando esta água;
- Conforme indicação médica aspire à solução a ser utilizada, introduza na região a ser tratada comprimindo levemente; o líquido fluirá normalmente.

Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, longe de materiais cortantes.

Composição:

Pera - PVC, Plastificante, Estabilizante Térmico, Cargas Minerais e Pigmentos.

Cânula - Polietileno de Baixa Densidade.

Dimensões do Produto:

- **Ducha Ginecológica Nº10** - Altura da Pera: 11,0 cm / Diâmetro: 8,0 cm (200ml).
- **Ducha Ginecológica Nº12** - Altura da Pera: 12,0 cm / Diâmetro: 8,5 cm (250ml).
- **Ducha Ginecológica Nº14** - Altura da Pera: 13,0 cm / Diâmetro: 9,0 cm (300ml).

- **Cânula P** - Comprimento: 10,0 cm / Diâmetro: 0,6 cm.
- **Cânula G** - Comprimento: 10,0 cm / Diâmetro: 2,0 cm.

Validade:

3 anos.

Responsável Técnica: Fabiane Tavares de Souza **CRFSP:** 91809