

Ficha Técnica
03/2019**Bulbo Aspirador**

Planilha de Dados

Código	Produto	Un.	% IPI	NCM	Cód. De Barras	Registro M.S	Padrão Grande	Padrão Pequena
AAA063	Bulbo Aspirador N.º 1	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000393	10392370016	27	3
AAA064	Bulbo Aspirador N.º 2	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000409	10392370016	22	2
AAA065	Bulbo Aspirador N.º 4	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000416	10392370016	14	2
AAA066	Bulbo Aspirador N.º 6	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000423	10392370016	12	2
AAA067	Bulbo Aspirador N.º 8	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000430	10392370016	8	1
AAA068	Bulbo Aspirador N.º 10	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000447	10392370016	7	1
AAA069	Bulbo Aspirador N.º 12	DZ	0%	90.18.39.21	7896788000454	10392370016	6	1

Indicado:

É utilizado para aspiração de fluídos fisiológicos, facilita a higiene do nariz e ouvido na retirada de resíduos ou excesso de muco. Utilizar somente com orientação médica.

Modo de Usar:

Primeiramente higienizar. A compressão e o relaxamento do bulbo são suficientes para sucção e expulsão dos fluídos. Após utilização o produto deverá ser totalmente limpo, e guardado em local seco.

Modo de lavar:

Desmontar o bulbo da ponta. Higienizar todo o conjunto com água quente, externa e internamente, secar. Montar novamente o conjunto. Agora o artefato está pronto para ser utilizado como aspirador de fluidos e como um insuflador de líquidos.

Composição:

Borracha natural e sintética.

Validade:

3 anos

Responsável Técnica: Fabiane Tavares de Souza **CRFSP:** 91809