

Tira Leite Materno

Planilha de Dados

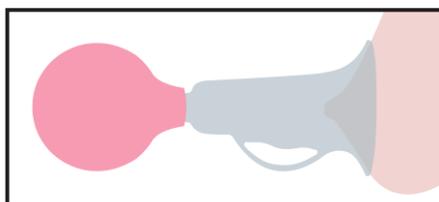
Código	Produto	Un.	% IPI	NCM	Cód. De barras	Registro M.S	Padrão Grande	Padrão Pequena
ATR012	Tira Leite Tradicional	pç.	8%	90.18.90.99	7896788000126	10392379009	36	4
AAZ012	Tira Leite Azul	pç.	8%	90.18.90.99	7896788030123	10392379009	36	4
ARO012	Tira Leite Rosa	pç.	8%	90.18.90.99	7896788010125	10392379009	36	4

Indicação:

Uso externo para facilitar a retirada do leite materno através de sucção. É um produto versátil, resistente e de fácil utilização, que proporciona conforto e segurança na retirada do leite materno.

Modo de lavar:

Coloque o produto desmontado em uma vasilha e jogue água quente sobre o mesmo, deixe por alguns minutos, retire a pera e aperte algumas vezes para retirar toda a água de seu interior, seque os componentes com uma toalha limpa.

Modo de Usar:

Antes da utilização, faça a limpeza de acordo com as instruções de higienização.

- Aperte a pera para tirar o ar que há dentro;
- Posicione a bomba contra a mama pressionando levemente de modo que o bico fique no centro da bomba;
- Solte a pera lentamente até obter a quantidade de leite para encher o reservatório;
- Repita essa operação tomando cuidado para que o leite não escorra pela pera.

Armazenamento e Transporte: Armazenar em local limpo, longe de materiais cortantes.

Dimensões do Produto: Comprimento – 14,0 cm / Diâmetro do Coletor – 6,0 cm.

Composição:

Pera - PVC, Plastificante, Estabilizante Térmico, Cargas Minerais e Pigmentos. **Coletor** - PVC.

Validade: 3 anos.

Responsável Técnica: Fabiane Tavares de Souza **CRFSP:** 91809

Rua Soldado José Reymão, 247 – CEP: 02178-040 – Parque Novo Mundo – São Paulo – SP.

Tel: (11) 2207-9488 / SAC: 0800-770-9488

www.sanity.com.br / sac@sanity.com.br