

Fita Hipoalergênica Micropore



Boletim Técnico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fita adesiva cirúrgica composta por dorso de não tecido de raio de viscose, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível à pressão, livre de látex. Fita não oclusiva permitindo a troca de vapores da pele. A fita é resistente a umidade porém não impermeável.

Indicações de Uso:

- Curativos cirúrgicos
- Curativos gerais
- Fixação de dispositivos médicos leve
- Peles sensíveis a componentes alergênicos (a base de látex)

Benefícios:

- Fita Porosa: Ajuda a manter a função e a integridade da pele reduzindo a ocorrência de maceração;
- Aumenta a adesividade progressivamente, permanecendo mais tempo aderida a superfície da pele.
- Mantém boa adesão mesmo quando molhada
- Facilidade de uso
- Devido a hipoalergenicidade, ideal para peles sensíveis.

. Recomendações de uso:

- Não aplicar a fita sob tensão à pele;
- Não aplicar substâncias químicas sobre a pele com o objetivo de aumentar a adesividade do produto;
- Não utilizar benjoim, éter, benzina, álcool ou outros solventes para remoção da fita. Se necessário, utilize vaselina

PRECAUÇÕES

As fitas cirúrgicas são produtos limpos, mas não esterilizados. Portanto, não devem ser aplicadas diretamente sobre locais que requerem esterilidade, como leito feridas e locais de punção intravenosa

Em caso de processo alérgico, descontinuar o uso do produto.

APRESENTAÇÃO MICROPORE COR BRANCA

MODELO	TAMANHO
1530	12,5mm x 10m
1530	25mm x 10m
1530	50mm x 10m
1530	100mm x 10m

APRESENTAÇÃO MICROPORE COR BEGE

MODELO	TAMANHO
1533	12,5mm x 10m
1533	25mm x 10m
1533	50mm x 10m

Número de cadastro ANVISA: 10002079007