



Fabricado por:
Salvapé Produtos Ortopédicos Ltda
CNPJ.: 60.883.741/0005-13
I.E.: 115.411.420.112
Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci
01521 000 - São Paulo - SP

Informações Técnicas
Central de Atendimento
(11) 3346 4535
® Marca Registrada
Copyright © 2006 Salvapé

PRODUTOS ORTOPÉDICOS DA CABEÇA AOS PÉS
SALVAPE



CÓDIGO
521

Afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado.
Instabilidade da artrose e artrite reumatoide.
Modo de usar, vide verso

SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS - **SALVAPE.COM.BR**

IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO



Foto ilustrativa

521

IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO®

INDICAÇÕES • Afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado • Instabilidade da artrose e artrite reumatoide • Treinos de ortostatismo em lesões de paralisia de membros inferiores.

CARACTERÍSTICAS • Substituição ao aparelho gessado.

COMPOSIÇÃO • Confeccionado em tecido e espuma atalhada com barbatanas posteriores de duralumínio e laterais de polietileno • Cinta elástica para compressão do joelho, passante de metal • Fechos aderentes.

PRECAUÇÕES • Verificar sempre o tamanho correto.

MODELOS • E (estreito) • L (largo).

TAMANHOS • 521-4 Altura aprox. 40 cm. (largo) • 521-5 Altura aprox. 50 cm • 521-6 Altura aprox. 60 cm • 521-7 Altura aprox. 70 cm.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO • Não usar produtos clorados • Secar à sombra.

ALCA-071 - Rev. 03

Venda sob prescrição médica
Produto não perecível


NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO

MODO DE USAR

Deve ser colocado no paciente por outra pessoa.

- 1 - Soltar o fecho aderente da faixa elástica central;
- 2 - Abrir completamente o imobilizador;
- 3 - Envolver a perna e observar se a barbatana de trás se molda aos contornos da coxa e panturrilha da perna;
- 4 - Fechar a faixa elástica central na altura da patela;
- 5 - Observar se as barbatanas laterais, removíveis, estão alinhadas entre elas (interna e externa da perna).
Em caso de ajuste das barbatanas removíveis, ajustar uma de cada vez;
- 6 - Fechar os demais fechos, passando-os pelos passantes de metal, seguindo a ordem de cima para baixo.
- 7 - Ajustar a faixa elástica central na altura da patela.

IMPORTANTE: Observar se o imobilizador ficou firme na perna. Não apertar demais os fechos para não prejudicar a circulação sanguínea.

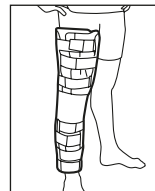

VALIDADE: Indeterminada. **GARANTIA:** Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos. **IMPORTANTE:** Este produto é de uso individual, vetado a sua reutilização por terceiros.

Fabricado por:
SALVAPÉ
Produtos Ortopédicos Ltda.
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ. 60.883.741/0005-13
Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada

☎ Atendimento ao Consumidor:
(11) 3346 4535

Copyright © 2006 SalvaPé

ANVISA nº: 81218560018

Resp. Técnico:
Dra. Lizete Baute - CRF-SP: 71.492