

## CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO MÁSCARA

**FINALIDADE:** Utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração e/ou com perturbações no transporte de oxigênio.

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:** Fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico. Nos modelos infantil com comprimento de 40 cm e adulto com comprimento de 50 cm. Possui extensão ligada ao conector com 90 cm. Conector universal e narina adulto e infantil macia. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico para esterilização a óxido de etileno e embalagem plástica para esterilização a raio gama.

### INSTRUÇÃO DE USO:

Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto. Abrir a assepticamente a embalagem antes da utilização do produto. Introduzir no nariz do paciente a narina e ajustar a alça de fixação sobre a cabeça. Ajustar a mesma com o auxílio do anel; Conectar o conector em uma extensão para oxigênio. Esta extensão possui em suas extremidades uma conexão apropriada sendo que, uma deve ser conectada ao conector do cateter e a outra deve ser conectada à fonte de oxigênio; Iniciar a oxigenoterapia.

**PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:** Artigo médico hospitalar de uso único. Destruir após uso, descartando em local próprio para materiais contaminados. Abrir a assepticamente a embalagem antes da utilização do produto. - O produto só pode ser instalado por profissional habilitado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação. Borbulhar o oxigênio em água para umedecer o mesmo evitando assim, o ressecamento das mucosas nasais. Recomenda-se que o cateter seja submetido a um teste antes de ser instalado no nariz do paciente. O teste é realizado colocando o produto na fonte oxigênio verificando se o mesmo permite a vazão do oxigênio pela narina do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver aberta, danificada, ou o prazo de validade estiver vencido. Armazenar em local limpo, fresco, seco, e ao abrigo de luz e livre de contaminação. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente, de acordo com a finalidade de uso.

**ARMAZENAMENTO:** armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

**TRANSPORTE:** transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

**VALIDADE:** 3 anos a partir da data de fabricação.

**REGISTRO ANVISA:** 10014169009

  
\_\_\_\_\_  
**Fabio Luiz Silva**

Responsável Técnico

CRBM/SP – 3940

**Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.**

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira  
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263  
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br