



BOLETIM TÉCNICO

Produto: IV FIX

O IV FIX, Fixador Estéril para Cateteres Periféricos, é uma cobertura que atende a recomendações Nacionais e Internacionais, visando:

“Para promover conforto, qualidade e segurança na assistência prestada ao paciente;
Reduzir custos hospitalares, infecciosas e mecânicas aos dispositivos intravasculares.” (INS Brasil, 2013)

“O propósito da cobertura é: 1) proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção por meio da interface entre a superfície do cateter e a pele; 2) fixar o dispositivo no local e prevenir a movimentação do dispositivo com dano ao vaso” (Anvisa, Setembro 2010)


Características Técnicas:

O IV FIX, Fixador Estéril para Cateteres Periféricos, é composto de tecido macio, com dorso de Rayon e Poliéster, resistente a água, não oclusivo, com adesivo de acrilato hipoalergênico. Possui recorte central para saída dos equipamentos e tubulações.

Possui duas tiras extras para estabilização de cateteres e tubulações. Adapta-se facilmente ao contorno anatômico. Produto esterilizado pelo processo de Óxido de Etileno. Embalagem Livre de látex.

Parte central
Proteção do Sítio de
Inserção do Cateter

Tira Extra

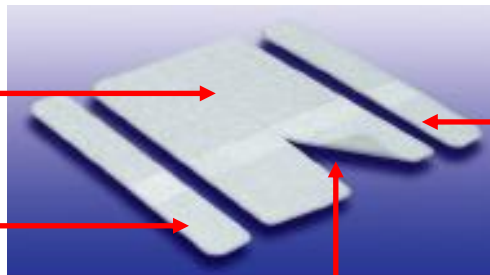

Tira Extra

Recorte Central
Abertura para passagem
de extensões e ou Equipo
de soro

Indicações de Uso:

Fixação e estabilização de Cateteres Periféricos

Tempo de Permanência:

“Todas as coberturas devem ser substituídas em intervalos regulares e imediatamente quando sua integridade estiver comprometida.” (INS Brasil, 2013)

“Quando apresentar-se suja, úmida ou sua integridade estiver comprometida” (INS Brasil, 2013)

Benefícios:

- Estéril
- Não Oclusivo.
- Hipoalergênico
- Praticidade de Uso
- Baixo custo de utilização
- Confortável ao paciente
- Resistente a água

Precauções de uso:

- Não aplicar diretamente sobre o sítio de inserção se houver sinais de infecção no local.
- Não aplicar substâncias químicas sobre a pele com o objetivo de aumentar a adesividade do produto
- Não aplicar sobre sangramentos. A hemostasia deve ser alcançada antes da aplicação do curativo.
- Não aplicar sob tensão.

Utilização do Produto**Preparo do Sítio de Inserção**

Realizar a tricotomia local se necessário, com tricotomizador elétrico. O uso de lâminas não é recomendável devido ao potencial de lesões de pele, contribuindo dessa forma com o aumento da colonização bacteriana local;

Usar o antisséptico de acordo com normas estabelecidas pela Instituição;

O local deverá estar sempre limpo e seco para a aplicação do curativo.

Aplicação

Abrir a embalagem do produto de maneira asséptica;

Destacar as duas tiras extras da parte principal do curativo;

Estabilizar o canhão do cateter com uma das tiras extras;

Remova o liner da parte central do curativo. Aplique-o sob o cateter, começando a aplicação pelo canhão do cateter até que todo o Sítio de Inserção esteja protegido. Alise suavemente toda a cobertura para uma melhor adesividade.

Retire o liner das abas do recorte central e fixe- as passando-as por baixo dos extensores, para garantir a sua acomodação

Utilize a segunda fita extra para reforçar a estabilização do canhão do cateter.

Remoção

Para retirar o I.V. FIX é necessário realizar o procedimento exatamente ao inverso. Iniciando a retirada pela última fita aplicada, a que foi utilizada para reforçar a estabilização do cateter.

Em seguida, com a ponta dos dedos inicie a retirada das abas, da fenda e do curativo.

Estocagem

Os curativos são fornecidos estéreis em embalagens individuais e acondicionados em caixas. A esterilidade do curativo é garantida a menos que sua embalagem individual sofra danos, ou seja, aberta. Estocar em temperatura ambiente (15° - 30° C). Evitar calor e umidade excessivos.

Validade

O período de validade está impresso em cada embalagem; 20 meses a partir da data da Esterilização

Apresentação Comercial:

Tamanho: 50 mm x 74 mm

2 Fitas para fixação 74 mm x 12 mm cada

Caixa com 100 curativos

Registro ANVISA: 80284930185

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA - ANVISA, SETEMBRO 2010
- DIRETRIZES PRÁTICAS PARA TERAPIA INFUSIONAL – INS BRASIL , EDIÇÃO 2013



3M DO BRASIL

MEDICAL DIVISION C3SD (CRITICAL & CHONIC CARE SOLUTIONS

DIVISION)

e-mail: helplinehospitalar@mmm.com

Help Line Hospitalar: 0800-0556903