

NOME DO PRODUTO: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SILICONIZADA SEM CUFF – PORTEX

Registro MS: 80228990083

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Canulas

Matéria Prima: Cloreto de Polivinila (PVC) Siliconizado

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Composta em PVC (Cloreto de Polivinila) especial para uso médico, atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção;

Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade;

A indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.

INDICAÇÃO DE USO

Quando procedimentos simples de ventilação se revelam inadequados (máscara de oxigênio, cateter nasal, entubação endotraqueal);

Para acesso direto à árvore traqueo-brônquica para a remoção de secreções.

INSTRUÇÃO DE USO

Antes de utilizar, desaperte a flange do obturador (se existir) e verifique se o obturador pode ser retirado da cânula. Reintroduza o obturador;
Pode se aplicar na ponta distal lubrificante para facilitar a inserção;
Introduza a cânula de traqueostomia de acordo com as técnicas médicas aceitas;
Segure a cânula de traqueostomia com fixador de traqueostomia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Produto isento de Látex.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
100.506.030	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 3,0
100.506.035	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 3,5
100.506.040	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 4,0
100.506.045	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 4,5
100.506.050	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 5,0
100.506.060	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 6,0
100.506.070	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 7,0
100.506.075	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 7,5
100.506.080	Cânula de Traqueostomia sem Balão - 8,0
100.506.090	Cânula de Traqueostomia sem Balão- 9,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
100.536.030	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 3,0
100.536.035	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 3,5
100.536.040	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 4,0
100.536.045	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 4,5
100.536.050	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 5,0
100.536.060	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 6,0
100.536.070	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 7,0
100.536.075	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 7,5
100.536.080	Cânula de Traqueostomia Fenestrada sem Balão - 8,0

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e limpo, em temperatura máxima de estocagem de 40°C.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Verificar todos os conectores do sistema de respiração;

Umidificar adequadamente os pacientes para evitar incrustações do lúmen da traqueostomia e danos à mucosa;

Realizar aspirações regulares para manter o lúmen desobstruído;

Realizar a troca da cânula no prazo máximo de 30 dias;

Pacientes que usam a cânula no ambiente caseiro devem ser orientados por um profissional especializado.

Usar solução salina para limpeza da cânula enquanto estiver colocada no paciente;

Não pode ser reutilizada.



INSTRUÇÃO DE USO

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259