



Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Cateter nasal

Nome Comercial: **Cateter nasal ajustável sobre orelhas – Hudson RCI**

Códigos do Fabricante:

Código	Tamanho	Comprimento do tubo	Star Lúmen	Conector Universal
1820	Adulto	2,10m	Sim	
1822	Adulto	2,10m	Sim	Sim
1824	Adulto	7,5m	Sim	Sim
1826	Pediátrico	2,10m	Sim	Sim
1828	Neonato/Pediátrico	2,10m	Sim	
1103	Adulto	2,10m	Não	

Nº de registro na ANVISA: 10342600031

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Foto



Descrição e Indicação

Cânula nasal tamanho adulto com formato sobre-a-orelha, flexível, macia, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente. Alguns modelos contêm tubo tipo “star lúmen”, com 2,10m de comprimento, à prova de deformação e torção para assegurar fluxo contínuo ao paciente.

Instrução de Uso

1. Conecte o tubo na fonte de oxigênio e ajuste o fluxo conforme prescrição clínica. Verifique a permeabilidade do fluxo de gás através do tubo.
2. Insira as ponteiros nasais nas narinas com os dois tubos sobre as orelhas e abaixo do queixo. Caso necessário, as ponteiros nasais podem ser cortadas com uma tesoura para atender as características individuais de cada paciente, facilitando o ajuste.
3. Cuidadosamente ajuste o anel de plástico dos tubos para fixar a cânula de maneira segura à face do paciente.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

FICHA TÉCNICA

Emissão:
ago/2014

Composição

Bolo Slide: Polietileno

Conector: PVC

Conector do tubo de fornecimento: PVC

Tubo: PVC

Cânula: PVC

Importador/Distribuidor: CNPH – *Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709