	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: ago/13
	FICHA TÉCNICA	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscara para Aerossolterapia Hudson

Nome Comercial: **Máscaras para Aerossolterapia Hudson RCI**

Códigos do Fabricante: 1075, 1076, 1080, 1083, 1084, 1085, 1095, 1385, 1388

Nº de registro na ANVISA: 10342600044

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Foto



Descrição e Indicação

As máscaras de Aerossolterapia são usadas em conjunto com nebulizadores para fornecer gás umidificado para os pacientes, pois realiza a hidratação, mobilização e remoção da secreção ressecada, auxilia na melhora da função muco-ciliar e do mecanismo da tosse.


Este sistema usa uma névoa em jato constante. Se a névoa é visualizada saindo da máscara durante sua utilização significa que o fluxo está adequado ao paciente.

Indicado para os seguintes casos:

- Pacientes que necessitam de apoio à ventilação assistida com aerossol;
- Pacientes com via aérea artificial necessitam de um sistema artificial de umidificação;
- Pacientes com secreção espessa que tendem a desenvolver patologias;
- Durante o período de recuperação pós-extubação;
- Pacientes que serão submetidos a broncoscopia;
- Pacientes com patologias obstrutivas e inflamatórias.

Instrução de Uso

a. Conecte um tubo de suprimento de aerossol entre a máscara e a fonte de gás.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: ago/13
	FICHA TÉCNICA	

- b. Se houver indicação, um nebulizador pode ser conectado à entrada da máscara e a linha de suprimento pode ser conectada diretamente à fonte de gás.
- c. Ajuste o fluxo apropriado de gás e verifique se o fluxo está passando através da máscara.
- d. Coloque a máscara na face do paciente de modo que ela se ajuste adequadamente.
- e. Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura.

Composição

Corpo da máscara: PVC.

Tira elástica: Poliéster

Tira de metal: Alumínio.

Produto livre de látex.

Importador/Distribuidor: CNPH – *Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL - 2917, Weck Drive Research Triangle Park, NC 27709 – USA.