

888-02 - Rev.01

Venda sob prescrição médica
Produto não perecível

051 - INFORMAÇÕES

COLAR CERVICAL DE ESPUMA®

INDICAÇÕES • Pós-traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatização. Estabilização da postura durante o sono.

CARACTERÍSTICAS • Em uma peça para facilitar a colocação, reforço interno, comprimento regulável.

COMPOSIÇÃO • Confeccionado em espuma macia, malha tubular, reforço interno em EVA e fechos aderentes.

PRECAUÇÕES • Verificar sempre o tamanho correto.

TAMANHOS • Infantil (altura 6 cm) • PP (altura 7,5 cm) • P (altura 8 cm) • M (altura 10 cm) • G (altura 12 cm).

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO • Usar esponja com detergente.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO

MODO DE USAR

O colar deve ser colocado no paciente por outra pessoa.

- 1 - Verificar o tamanho correto;
- 2 - Posicionar a curva central do colar sob o queixo do paciente;
- 3 - Observar se a parte superior do colar está 2 dedos de distância do lóbulo da orelha (ponta da orelha);
- 4 - Envolver o pescoço do paciente fechando o fecho aderente na extremidade que contém o logotipo SalvaPé.



VALIDADE: Indeterminada.

GARANTIA: Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos. **IMPORTANTE:** Este produto é de uso individual, vedada sua reutilização por terceiros.

ANVISA nº: 81218560024

Resp. Técnico: Dra. Ilzete Baute - CRF-SP: 71.492

SALVAPÉ®

Fabricado por:

SALVAPÉ
Produtos Ortopédicos Ltda.
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ. 60.883.741/0005-13
Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada

☎ Atendimento
ao Consumidor:
(11) 3346 4535

Copyright © 2006-2020 SalvaPé