

888-160 - Rev 00

Venda sob prescrição médica
Produto não perecível

940-03 - INFORMAÇÕES

FORRAÇÃO ORTOPÉDICA PROTETOR P/ CALCANHAR E TORNOZELO®

INDICAÇÕES • Prevenção de escaras (lesões por pressão) • Proteção e apoio para o calcanhar e tornozelo nos casos de cirurgia e recuperação.

CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano com perfil especialmente desenhado no formato "caixa-de-ovo".

COMPOSIÇÃO • Espuma de poliuretano • Fecho aderente.

PRECAUÇÕES • Não manter contato direto entre a pele e a forração
• Utilize uma meia de algodão antes de colocar o produto.

MODELO • Bilateral.


TAMANHO • Único.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO • Não aplicável.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO

MODO DE USAR

- 1 - Abrir o fecho aderente;
- 2 - Envolver o tornozelo e o calcanhar com a forração;
- 3 - Fechar o fecho aderente.

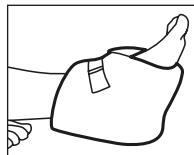

VALIDADE: Indeterminada.

GARANTIA: Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos.

IMPORTANTE: Este produto é de uso individual, vedada sua reutilização por terceiros.

ANVISA nº: 10222460038

Resp. Técnico: Dra. Ilzete Baute - CRF-SP: 71.492

SALVAPÉ S®

Fabricado por:

SALVAPÉ
Produtos Ortopédicos Ltda.
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ. 60.883.741/0005-13
Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada

☎ Atendimento
ao Consumidor:
(11) 3346 4535

Copyright © 2006 SalvaPé