



PRODUTOS ORTOPÉDICOS DA CABEÇA AOS PÉS

SALVAPE



www.salvape.com.br



Copyright © 2006 Salvape

® Marca Registrada

(11) 3346 4535

Informações Técnicas
Central de Atendimento

01521 000 - São Paulo - SP

Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci

I.E.: 115.411.420.112

CNPJ: 60.883.741/0005-13

Salvape Produtos Ortopédicos Ltda

Fabricado por:

CÓDIGO

582

- Tração cutânea em fraturas completas do M.I.
- Luxação congênita do quadril, artroses da coxa femoral e do joelho
- Correção de deformidades em flexão da coxa femoral e do joelho

**Modo de usar,
vide verso**



Foto ilustrativa

Não corra riscos. Exija produtos com Registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SUORTE ADESIVO para **Tração de M.I.**





582

SUPOORTE ADESIVO PARA TRAÇÃO DE M.I.®

ALCA-114

Venda sob prescrição médica
Produto não perecível

INDICAÇÕES • Tração cutânea em fraturas completas do M.I., luxação congênita do quadril, artroses da coxa femoral e do joelho • Correção de deformidades em flexão da coxa femoral e do joelho.

CARACTERÍSTICAS • Faixa auto-adesiva com suporte rígido de pé revestido em espuma.

COMPOSIÇÃO • Confeccionado em napa com fita auto-adesiva, base para o pé em PVC revestida com espuma atalhada e cordão de nylon para tração.

PRECAUÇÕES • O processo deve ser acompanhado pelo médico responsável.

TAMANHO • Único.


LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO • Não se aplica.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO

MODO DE USAR

- 1 - Apoiar o pé do usuário no centro da faixa de napa, de modo que as extremidades estejam em equidistantes da base do pé;
- 2 - Retirar a base de papel da fita adesiva fixando-a à pele do paciente.

OBS.: O processo deve ser acompanhado pelo médico responsável.

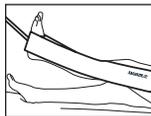

Fabricado por:
SALVAPÉ
Produtos Ortopédicos Ltda.
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ. 60.883.741/0005-13
Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada
☎ Atendimento ao Consumidor:
(11) 3346 4535

Copyright © 2006 SalvaPé

Registro ANVISA nº: 10222460053

Resp. Técnica:
Vide etiqueta da embalagem.

VALIDADE: Indeterminada. **GARANTIA:** Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos. **IMPORTANTE:** Este produto é de uso individual, vetado a sua reutilização por terceiros.

