

PRODUTO MARCA: BIO VAC		NOME TÉCNICO: SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO	
CADASTRO ANVISA: 80192450016		AFE: 8.01924.5	
FABRICANTE: MB INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA			
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - ANVISA			
MODELOS COMERCIAIS / APRESENTAÇÃO:			
Reservatório 150ml, 200ml, 400ml, 600ml – Dreno Radiopaco 1,00m, 1,20m – Cânula (3.2, 4.8, 6.4) com conector.			
Obs: O produto é isento de látex.			
Embalagem: Individual em papel grau cirúrgico com filme plástico. Acondicionamento: Caixa Master com 20 unidades.			
CLASSE DE RISCO: II	NCM: 90183929	PRODUTO ESTÉRIL	MÉTODO: ÓXIDO DE ETILENO
COMPOSIÇÃO: PARTES COMPONENTES E MATÉRIA PRIMA			
COMPONENTE	MATÉRIA PRIMA	COMPONENTE	MATÉRIA PRIMA
Reservatório	PVC	Dreno Radiopaco	PVC
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: O produto deverá ser armazenado em local livre de efeitos causados por agentes externos (chuva, sol e calor) temperatura 30°C - umidade 80%.			
INSTRUÇÃO DE USO:			
Embalagem: 1. Verificar a integridade da embalagem e validade do produto. 2. Abrir a embalagem conforme técnica de pétala. 3. Realizar transferência asséptica para campo cirúrgico.			
Produto: 1. Verificar a integridade do produto. 2. Conectar tubo extensor ao reservatório 3. Cortar o conector “Y” no diâmetro do cateter 4. Ajustar cateter (dreno) ao conector “Y”, fazendo a conexão do sistema. 5. Fazer compressão do reservatório até o limite máximo e pinçar (clampear) o tubo até o início da drenagem. 6. Para esvaziamento do reservatório, fazer pinçamento (clameamento) do tubo, abrir tampa da válvula de saída do reservatório e dispensar o líquido. 7. Fechar a tampa do reservatório e pinçar o tubo, repetir a compressão máxima do reservatório para reinício do processo.			
Obs.: 1. Para aferir o volume drenado, colocar o reservatório na posição vertical, após pinçamento (clameamento) do tubo. 2. Descartar conforme normas da CCIH de cada hospital.			
ADVERTÊNCIAS:			
Artigo médico-hospitalar de uso único. Destruir após o uso.			
A instalação e o tempo de uso do produto fica a critério do profissional competente responsável.			
PRECAUÇÕES:			
O produto deve ser manuseado com assepsia e só deve ser aberta a embalagem no momento do uso.			
OBSERVAÇÃO:			
O produto deverá ser transportado e armazenado em local livre de efeitos causados por agentes externos (chuva, sol e calor)			
INDICAÇÃO FINALIDADE: Indicado para cirurgia geral, cirurgias ortopédicas, cirurgias plásticas, cirurgias neurológicas e ginecológicas.			

CÓDIGO EAN	DESCRIÇÃO
7898903447137	BIO VAC 2.4 - SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO
7898903447144	BIO VAC 3.2 - SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO
7898903447151	BIO VAC 4.8 - SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO
7898903447168	BIO VAC 6.4 - SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO