

3M Tegaderm™ IV 1633BR

Simple. Seguro.  
Confiável.



### Aplicação




Retire o papel protetor do curativo que contém as tiras estabilizadoras



Com uma mão coloque a tira estabilizadora em cima do canhão (hub) do cateter



Retire o papel protetor do curativo expondo o adesivo

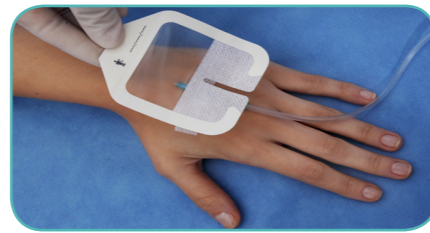

Centralize a área transparente sobre o ponto de inserção do cateter



Aplique o curativo e alise-o cuidadosamente



Sobreponha as bordas de tecido sobre a pele para proteger o sítio de inserção



Retire cuidadosamente a moldura, usando os dedos para alisar as bordas



Reforce o curativo com a segunda tira estabilizadora

### Remoção



Retire a tira estabilizadora



Puxe uma ponta do filme transparente e estique horizontalmente sempre apoiando a pele



Retire a fenda do curativo puxando para cima

### Apresentação Comercial

Descrição	Unidades/Caixa	Tamanho
3M Tegaderm™ IV 1633BR	100	7 cm x 7 cm

CRC Centro de Relacionamento com o consumidor

Helpline: 0800-0556903

[www.3m.com.br/assistenciaaopaciente](http://www.3m.com.br/assistenciaaopaciente)

Curta nossa fan page [www.facebook.com.br/3msolucoesparaenfermagem](http://www.facebook.com.br/3msolucoesparaenfermagem)

**3M**

Soluções para Cuidado Crítico e Crônico



3M Tegaderm™ IV 1633BR

Fixação  
segura,


para o  
Cateter  
Periférico

**3M**



## A Solução completa em fixação para cateteres periféricos

O 3M Tegaderm™ IV 1633BR é um curativo indicado para cateteres periféricos, com membrana semipermeável de poliuretano, estéril, com barreira bacteriana e viral. Promove a estabilização do canhão (Hub) do cateter, permitindo a visualização do sítio de inserção, além de atender as recomendações nacionais e internacionais na prática de terapia intravenosa.

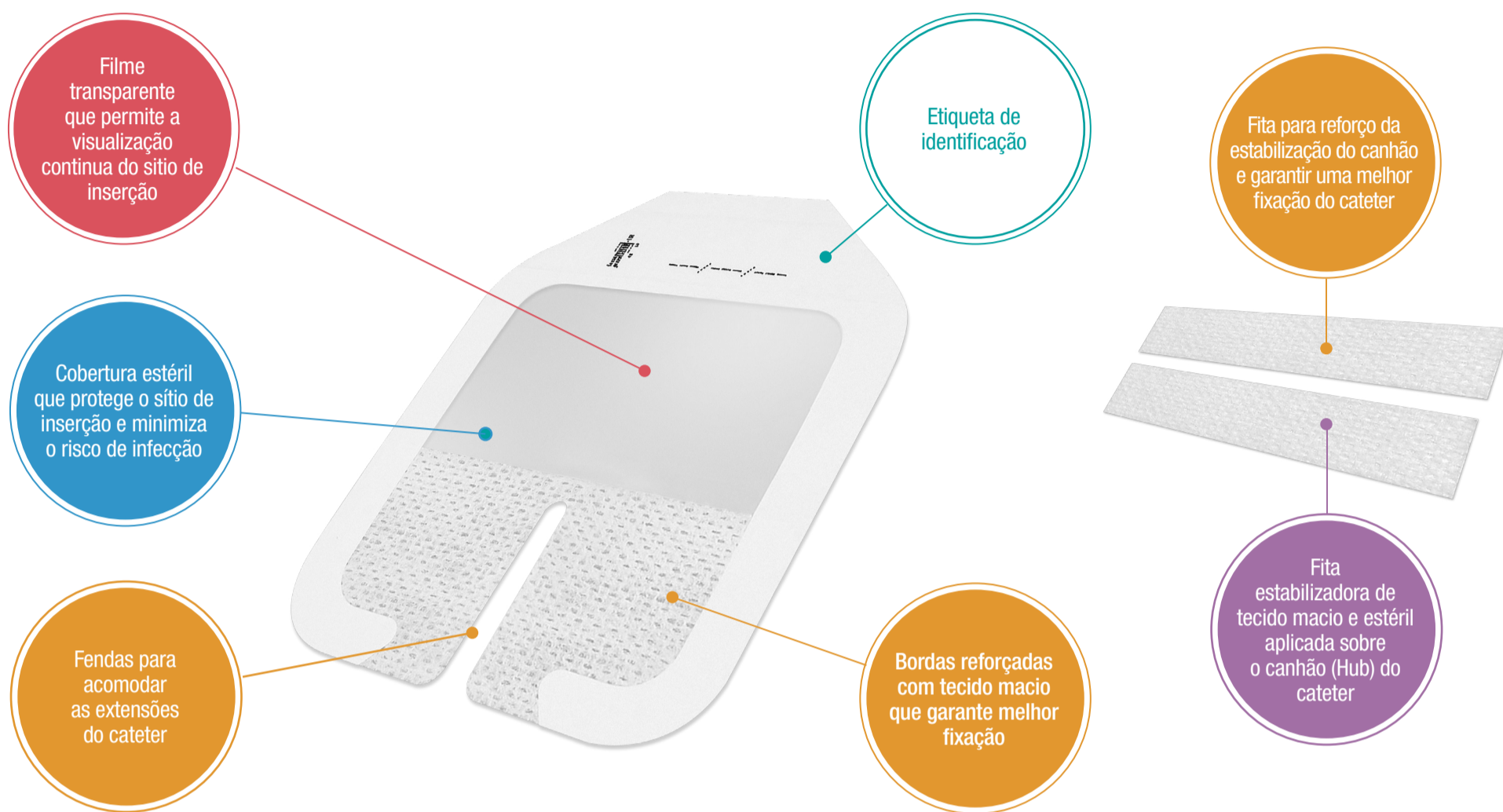

Um curativo estéril que **estabiliza, fixa e protege** com a segurança que você precisa e o seu paciente **merece.**

Para garantir a eficácia da terapia e a segurança do dispositivo, a correta fixação e proteção do sítio de inserção são fundamentais. Por isso, o Tegaderm™ 1633BR possui características diferenciadas, seguindo o conceito ESCESIVE.

## Conceito ESCEVISE também no cateter periférico

**Uma prática segura e sustentada por recomendações nacionais e internacionais.**

O ESCEVISE é um conjunto de conceitos criados pela 3M, baseado em recomendações nacionais e internacionais, que facilitam o seu dia a dia e garantem a segurança de seu paciente.



### RECOMENDAÇÕES DE GUIDELINES

#### Cobertura Estéril e Visualização

- Proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção por meio da interface entre o cateter e a pele.
- Fixar o dispositivo no local e prevenir sua movimentação e danos ao vaso.
- O sítio de inserção do cateter prevê o acesso direto à circulação e o produto/material que entra em contato com o sítio de inserção deverá ser estéril

#### Estabilização do Cateter e Segurança

- A estabilização do cateter deve ser utilizada para preservar a integridade do dispositivo de acesso, impedindo a migração do cateter e a perda do acesso.
- Cateteres devem ser estabilizados por meio de um método que não interfira com a avaliação e monitoramento do sítio de inserção, nem impeça a circulação vascular ou a entrega da terapia prescrita.

(FONTE - Infusion Nursing Standards of Practice - INS, 2011)

(FONTE - Manual de Orientações para Prevenção de Infecção Primária de Corrente Sanguínea - ANVISA 2010)