


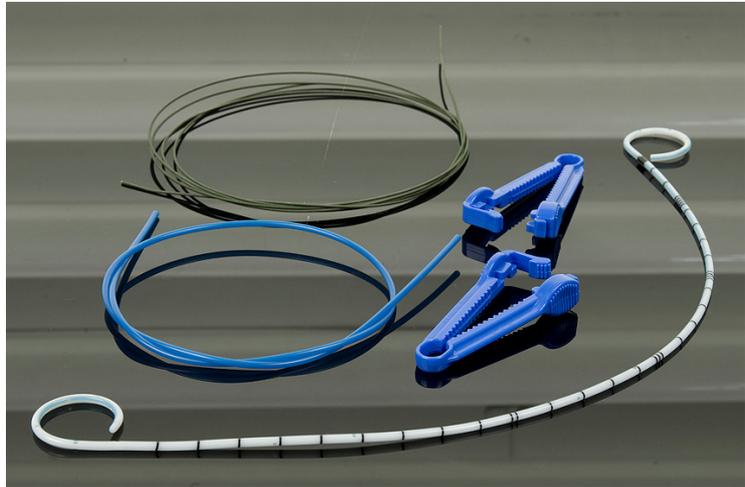

CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

CARACTERÍSTICAS

- Cateter ureteral em “J” de poliuretano, com as opções de extremidades: uma ponta aberta e outra cilíndrica (fechada), ou com ambas extremidades abertas, orifícios de drenagem em toda sua extensão, graduado de centímetros em centímetros, radiopaco, linha de posicionamento de cor preta;
- Bainha empurradora em poliuretano flexível, com 45 cm de comprimento;
- Mandril em espiral confeccionado em aço inox revestido de teflon, com extremidade de segurança flexível e ponta rígida marcada, de aproximadamente 150 cm de comprimento;
- 2 pinças de fixação, em plástico.



Ponta Fechada

Ponta Aberta

Acondicionada em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

MEDIDAS E CALIBRES

REFERÊNCIA	TAMANHO	COMPRIMENTO	PONTA	
94060304	CH 3,0	16 cm	Aberta - Fechada	
94064803	CH 4,8	16 cm	Aberta - Aberta	
94180704	CH 6,0	24 cm	Aberta - Fechada	
94180704	CH 7,0	24 cm		
94180804	CH 8,0	24 cm		
94184804	CH 4,8	24 cm		
94210604	CH 6,0	26 cm		
94210704	CH 7,0	26 cm		
94210804	CH 8,0	26 cm		
94214804	CH 4,8	26 cm		
94240604	CH 6,0	28 cm		
94240704	CH 7,0	28 cm		
94240804	CH 8,0	28 cm		
94244804	CH 4,8	28 cm		
94510604	CH 6,0	26 cm		Aberta - Aberta
94510704	CH 7,0	26 cm		
94514804	CH 4,8	26 cm		
94540604	CH 6,0	28 cm		
94540704	CH 7,0	28 cm		

COMPOSIÇÃO

Cateter: Poliuretano com linha radiopaca;
Guia de introdução (mandril): poliuretano flexível;
Mandril em espiral: aço inox revestido de teflon;
Pinças de fixação
Isento de látex, isento de ftalato (DEHP);

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

- O Cateter Ureteral Duplo J é utilizado para:
- Drenagem interna temporária da urina, pela união ureteropélvica até a bexiga;
 - Para alívio da obstrução ureteral numa série de condições benignas, malignas e pós-traumáticas;
 - Em casos de extravasamento urinário devido a orifícios nas vias urinárias, que podem causar dor e infecções severas, até a cicatrização do(s) orifício(s);
 - Dilatação do ureter antes do procedimento de litotripsia;
 - Após transplante renal, como suporte na cicatrização do ureter



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO

Produto médico que somente deve ser utilizado por médicos profissionais da área urológica. Só deverão ser utilizados os produtos que possuam suas respectivas embalagens íntegras, devendo ser descartado o uso daqueles cuja embalagem estejam abertas, danificadas ou violadas para que haja garantia de sua esterilização e utilização.

Antes de utilizar ler as instruções, observar as advertências e precauções necessárias a este tipo de intervenção. Verificar também eventuais outros dispositivos para uso simultâneo com o conjunto de drenagem, contraindicações e possíveis complicações.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Ao utilizar o dispositivo, sempre use equipamento de proteção pessoal apropriado.

- Introduzir o cateter através do fio guia, evitando qualquer dobra, avance o cateter pela uretra
- Dilatar o canal da punção ao longo do fio guia através do cateter.
- Empurrar o cateter ao longo do fio guia e para a correta posição.
- Sempre observar a posição e a localização do cateter, utilizando o meio radiopaco (contraste)
- Retirar cuidadosamente o fio guia permitindo a formação espontânea de um pigtail no rim.
- Fixar o cateter no lugar.

ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

O conjunto duplo J é fornecido estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

FICHA TÉCNICA



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

FABRICANTE

Fabricante:

Electroplast S/A
Servando Gomez, n° 2450
Montevideo - Uruguai

Importador e Distribuidor:

Badeia Comércio e Importação Ltda
Rua do Hipódromo, 1465/1473 – Fone: 11-2292.0474 / Fax.: 11-2292.2053
Cep.: 03162-020 – São Paulo - SP
e-mail: badeia@badeia.com.br
site : www.badeia.com.br
Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

Registro ANVISA: 10297020026