







Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
   	<p>Pacote Bowie & Dick</p> <p>Modelos: 0135 – padrão 4Kg, com folha de alerta</p> <p>1233 – padrão 4Kg</p> <p>1300 e 1301 – padrão 7Kg</p> <p>Folha com Ind. Químico avulsa para montar pacote manual: 0130/1227 Folha</p> <p><i>Produto não passível de registro na ANVISA</i></p>	<p>Este teste irá monitorar a capacidade dos esterilizadores com sistema pré-vácuo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> remover o ar do centro do pacote – ou seja, o teste verifica se o equipamento removeu com eficiência o ar de dentro da câmara interna; penetração do vapor através de sua energia, no centro do pacote – ou seja, se o vapor teve condições de penetrar dentro da densidade do pacote. 	<p>Indicador Químico Tipo 2 de acordo com a ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.</p> <p>Pacote pronto uso é normatizado pela NBR/ISO 1140-4 para os padrões de 7 kg, ou pela NBR/ISO 11140-5 para os padrões 4Kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diariamente apenas em autoclaves pré-vácuo, no primeiro ciclo do dia (após o ciclo de pré-aquecimento). O teste de Bowie & Dick deverá ser utilizado também após a instalação, mudanças de local e após grandes reparos no esterilizador. 	<ul style="list-style-type: none"> 00135LF c/ Folha Alerta – caixa com 30 pacotes 1233LFBR - caixa com 30 pacotes 1300 - caixa com 20 pacotes 1301 – caixa com 20 pacotes 0130/1227 Folha – caixa com 50 folhas avulsas (QUD = 5 caixas) 	<ul style="list-style-type: none"> CME Empresas de Esterilização
 	<p>Comply™ Fita com Indicador Químico</p> <p>Fita 1322</p> <p>Fita 1355</p> <p><i>Produto não passível de registro na ANVISA</i></p>	<p>Os indicadores químicos externos ou de processo auxiliam na diferenciação dos pacotes que já passaram pelo processo de esterilização, facilitando a identificação no arsenal e evitando que pacotes não processados sejam utilizados.</p>	<p>Categorizado como Indicador Químico Tipo 1 de acordo com ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.</p>	<p>Fechamento e identificação externa de todos os pacotes/containers que passarão pelo processo de esterilização. Na aplicação, pressione a fita na superfície do pacote para potencializar o adesivo sensível a pressão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fita 1322 para Vapor Pacotes embalados com tecido reutilizável e papel, 18mmX55m, caixa com 28 Rolos Fita 1355 para Vapor, Pacotes embalados com não tecido e outros descartáveis, 18mmX55m, caixa com 28 Rolos 	<ul style="list-style-type: none"> CME Empresas de Esterilização Clínicas odontológicas

