


**REGISTRO ANVISA: 81981090001**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)**  
**Composição: Vinil**  
**Cor: Transparente**  
**Certificado de Aprovação (CA): 40.254**  
**Validade: 5 anos da data de fabricação**

**INDICAÇÃO DE USO**

**Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como: médicos hospitalares, laboratoriais, cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, pesquisa e outros.**

**DESCRIÇÃO**

Luva para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual **ISO 11193-2:2013** - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.


**ISO 374:2018 - Risco Químico - Tipo B**

Produto Químico	Classe	Nível
Hidróxido de Sódio 40%	<b>K</b>	<b>6</b>
Ácido Sulfúrico 96%	<b>L</b>	<b>2</b>
Hidróxido de Amônio 25%	<b>O</b>	<b>3</b>
Peróxido de Hidrogênio 30%	<b>P</b>	<b>6</b>
Formaldeído 37%	<b>T</b>	<b>1</b>

**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
7 (P)	7898619332444	17898619332441
8 (M)	7898619332451	17898619332458
9 (G)	7898619332468	17898619332465
10 (EG)	7898619332475	17898619332472

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos na luva; Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades e se o tamanho da luva está de acordo com sua mão; Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho; A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva; Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho. Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva seja totalmente removida; Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso; Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

**INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Produto de uso único; Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Proibido reprocessar; Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada; Esterilizada por irradiação; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

**DURABILIDADE**

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.