

**SANITY**

INBORPLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E PLÁSTICO LTDA

CNPJ 62.618.483/0001-40

Ficha Técnica
07/2019

Bolsa Térmica Gel 300ml

Planilha de Dados

Código	Produto	Un.	% IPI	NCM	Cód. De barras	Registro M.S	Padrão Grande	Padrão Pequena
AAA084	Bolsa Gel 300 ml	pç.	5%	39.12.31.19	7896788001116	10392370006	40	5

DUN14

Padrão G	Padrão P
57896788001111	47896788001114

SKU	SNT-BTG1
-----	----------

Indicação

A Bolsa térmica Gel é indicada para a utilização de compressas quentes, frias ou geladas. Por ser leve e flexível, possui grande maleabilidade em sua aplicação, proporcionando conforto e bem estar. Auxilia no tratamento de dores musculares, processos inflamatórios, cólicas menstruais, dores de ouvido, reumatismo, tendinite, entre outras.

Modo de Usar

Recomenda-se que as aplicações das compressas quentes, frias ou geladas, sejam ministradas por um período de 15 a 20 minutos, pode-se repetir o processo por 3 a 4 vezes ao dia, conforme necessidade.

Termoterapia

Aquecimento no fogão: Coloque a água em um recipiente compatível com o tamanho do produto e leve ao fogo até ferver. Desligue a chama. Coloque a Bolsa Térmica Gel Sanity no recipiente com a água quente e mantenha por um período de 5 minutos. Ao tira-la, não utilize objetos pontiagudos. Seque-a e introduza no Suporte para Bolsa Térmica Gel Sanity ou a envolva em uma toalha, posteriormente coloque a compressa em contato com o local desejado. Caso queira reaquecê-la enquanto morna, aquecer novamente a água no fogão e repita os procedimentos.

Aquecendo no micro-ondas: Adicione aproximadamente 500 ml de água em um recipiente apropriado para a utilização em micro-ondas, mergulhe a Bolsa Térmica Gel Sanity e aqueça por 4 minutos.

Retire a bolsa do micro-ondas utilizando um objeto que não seja pontiagudo. Seque-a e a introduza no Suporte para Bolsa Térmica Gel Sanity ou a envolva em uma toalha e coloque a compressa em contato com o local desejado. Caso queira reaquecê-la enquanto morna, usar metade do tempo estipulado, ou seja, 2 minutos e repita os procedimentos.

Rua Soldado José Reymão, 247 – CEP: 02178-040 – Parque Novo Mundo – São Paulo – SP.

Tel: (11) 2207-9488 / SAC: 0800-770-9488

www.sanity.com.br / sac@sanity.com.br

Crioterapia

Gelada: Coloque a bolsa no freezer por no máximo 45 minutos ou no congelador por no máximo 2 horas, retire-a e introduza-a no Suporte para Bolsa Térmica Gel Sanity ou a envolva em uma toalha. Proceda normalmente com a compressa.

Fria: Mantenha a Bolsa Gel Sanity na geladeira até obter a temperatura desejada. Proceda com a compressa. Obs. O uso de suporte ou toalhas envolvendo a bolsa na compressa fria é opcional.

Em caso de congelamento da bolsa, a mesma não perde a sua funcionalidade, porém, para um perfeito ajuste anatômico é necessário aguardar o retorno do produto ao seu estado inicial (gel).

Precauções:

- Não deite ou sente sobre a Bolsa Térmica Gel Sanity ou a submeta a qualquer tipo de pressão;
- Uso não é aconselhado para usuário com doença de pele ou deficiência na circulação sanguínea (consulte o médico);
- Recomenda-se proteção no local da aplicação (toalha ou suporte para bolsa gel Sanity) nos primeiros minutos de aplicação;
- Não utilizar objetos pontiagudos em seu manuseio;
- O uso em crianças deve ser supervisionado constantemente por um adulto;
- Não se deve aplicar a bolsa quente sobre ferimentos abertos, patologias vasculares e traumas recentes.

Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, longe de materiais cortantes.

Composição:

Produto Atóxico, gel a base de celulose vegetal e conservantes, filme de nylon revestido em polietileno.

Dimensões do produto:

15 x 17 cm (300 ml).

Validade:

3 anos.

Responsável Técnica: Fabiane Tavares de Souza **CRFSP:** 91809