



Tubos BD Vacutainer®




Tubo BD Vacutainer® Seco

Os tubos BD Vacutainer® de plástico para soro têm ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na Bioquímica e Sorologia.


Código	Descrição	Tamanho	Volume	Cor
368492**	Seco	13 x 75	2	
360053*	Seco	13 x 75	4	
367820**	Seco	16 x 100	10	

Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL.

Instruções de uso:

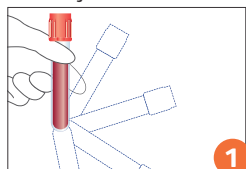

Homogeneizar de 5 a 8 vezes

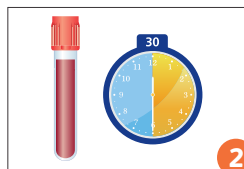

Com o tubo na posição vertical, aguardar 60 minutos para a retração do coágulo.

*Tubo BD Vacutainer® Seco: Registro ANVISA N° 10033430741

**Tubo BD Vacutainer® Seco: Registro ANVISA N° 10033430470