

FICHA TÉCNICA
SUR-FIT® Bolsa Coletora para Colostomia/Ileostomia

Nome Genérico	Bolsa coletora drenável para sistema de duas peças com flange para colostomia/ileostomia
Nome Comercial	SUR-FIT® Bolsa Coletora para Colostomia/Ileostomia
Imagem	
Descrição	As bolsas coletoras SUR-FIT® Plus são parte integrante do sistema de duas peças com flange para colostomia/ileostomia.
Marca	SUR-FIT® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composição do Produto	Bolsa Coletora: Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos. Apresentam uma tela externa perfurada de polietileno com acetato de vinila e um flange de polietileno para encaixe na placa protetora. Clipe de Fechamento: Polipropileno.
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • As bolsas apresentam tela perfurada fixada sobre a superfície da bolsa, que impede o acúmulo de umidade, permitindo a respiração da pele e aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. • As bolsas são drenadas simplesmente soltando o clipe de fechamento na parte inferior da bolsa, permitindo uma manutenção rápida e fácil. • Opaca ou transparente, para quando houver a necessidade de visualização do efluente. • O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele. • A flange da bolsa apresenta 8 pontos de fixação para proporcionar maior segurança e adaptação. • A flange da bolsa apresenta encaixe suporte para cinto.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>As bolsas SUR-FIT® Plus são parte integrante do sistema de duas peças para ostomia com flange. Este sistema consiste de dois itens básicos separados: a placa adesiva protetora de pele e a bolsa coletora. O sistema de duas peças oferece a flexibilidade de colocação da bolsa coletora sem necessidade de remover a placa protetora da pele.</p> <p>As bolsas SUR-FIT® Plus devem ser utilizadas em conjunto com os modelos de placa protetora SUR-FIT® Plus disponíveis, as quais são vendidas separadamente e são de uso exclusivo com as bolsas coletoras SUR-FIT® Plus.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo que protege a pele do contato com os efluentes. A placa protetora que fica aderida à pele possui um flange plástico, um tipo de fecho de pressão que permite o encaixe na flange compatível da bolsa</p>

	<p>coletora. O flange das bolsas possui um sistema de 8 pontos de fixação para conexão ao flange da placa protetora e encaixe suporte para cinto.</p> <p>APLICAÇÃO DA BOLSA:</p> <p>Antes de aplicar a bolsa deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre no seu interior, abrindo-a delicadamente.</p> <p>Para fixação da bolsa à placa protetora, encaixe o flange da bolsa no flange da placa protetora, pressionando todo o contorno do flange até ouvir vários cliques para assegurar-se do completo encaixe.</p> <p>Este produto pode permanecer colocado durante o banho, chuveiro ou natação. Seque a bolsa sem esfregar.</p> <p>REMOÇÃO DA BOLSA:</p> <p>Desencaixe o flange da bolsa conectado ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.</p>
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029010
NCM	3006.91.10

Bolsa Transparente				
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro Flange	Apresentação Comercial
401600	1197853	265704	32 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
401602	1197855	265706	45 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
401603	1197856	265708	57 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
401604	1197857	265709	70 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
401608	1197858	265702	100 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento

Bolsa Opaca				
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro Flange	Apresentação Comercial
402531	1197859	265654	32 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
402532	1197860	265655	38 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
402533	1197861	265656	45 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
402534	1197862	265657	57 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
402535	1197863	265658	70 mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento