


FICHA TÉCNICA
Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Recortável

Nome Genérico	Bolsa de urostomia de uma peça drenável e recortável.
Nome Comercial	Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Recortável
Imagem	
Descrição	<p>As bolsas Active Life® são dispositivos de uma peça para urostomia compostas por uma barreira protetora de pele Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.</p>
Marca	Active Life® ConvaTec® Stomahesive®
Fabricante	<p>ConvaTec Limited – Reino Unido</p> <p>ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana</p>
Composição do Produto	<p>Bolsa Coletora: Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.</p> <p>Barreira Protetora da Pele Stomahesive®: gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. As placas possuem um anel de suporte, composto de acetato de vinilileno.</p> <p>Torneira de Drenagem: Acetato vinilileno.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • São compostas de válvula anti-refluxo que permite que a urina flua diretamente dentro da bolsa e não retorne, evitando o contato com o estoma. • Multi-medidas: recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada. • Bolsa transparente: Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens. • Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. • Esvaziamento da bolsa fácil e rápido através da torneira de drenagem dobrável.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se a superfície da pele periestoma estiver irregular ou enrugada, preencher as depressões ou pregas da pele com pasta Stomahesive. O uso rotineiro da pasta protetora Stomahesive ao redor da base do estoma aumenta o tempo de uso da bolsa. <p>PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura e não houver sinais de irritação. • Utilize o guia de medida do papel protetor na parte de trás da barreira adesiva para traçar o contorno do estoma. • Antes de recortar a barreira adesiva, separe as partes da frente e de trás da bolsa a fim de evitar cortá-las por engano. • Pressione a barreira protetora contra a pele alisando-a para garantir melhor aderência. • Antes de remover a bolsa deve ser realizada drenagem total do efluente. 										
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.										
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029009										
NCM	3006.91.10										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>Brasíndice</th> <th>SIMPRO</th> <th>Diâmetro</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64927</td> <td>1197895</td> <td>265712</td> <td>19 - 45 mm</td> <td>10 bolsas</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro	Unidades por Caixa	64927	1197895	265712	19 - 45 mm	10 bolsas	
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro	Unidades por Caixa							
64927	1197895	265712	19 - 45 mm	10 bolsas							