


FICHA TÉCNICA
Active Life® Little Ones Bolsa Infantil de Colostomia / Ileostomia

Nome Genérico	Sistema de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia
Nome Comercial	Active Life® Little Ones Bolsa Infantil de Colostomia / Ileostomia
Imagem	
Descrição	<p>As bolsas Active Life® Little Ones são dispositivos de uma peça para colostomia/ileostomia compostas por uma barreira protetora de pele flexível Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.</p>
Marca	Active Life® ConvaTec® Stomahesive®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composição do Produto	<p>Bolsas coletoras Little Ones: filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de vinilileno (EVA).</p> <p>Tela Externa Perfurada: polietileno com acetato de vinila, fixada sobre a superfície da bolsa que fica em contato com a pele.</p> <p>Barreira Protetora da Pele Stomahesive® modificada: composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, óleo mineral e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente.</p> <p>Clipe de Fechamento: arame recoberto com espuma de polilefina.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • As bolsas coletoras Little Ones são totalmente à prova de odores, conferem maciez e reduzem os ruídos. • Multi-medidas: recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada. • Bolsa transparente: Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens. • Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. • A tela perfurada fixada à parte posterior da bolsa impede o acúmulo de umidade, permitindo a respiração da pele e aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele.
Recomendações de Uso	Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

	<ul style="list-style-type: none"> • A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes. • Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa. A placa protetora Stomahesive adere à pele escoriada ou úmida; contudo, a borda adesiva flexível só adere à pele seca. <p>PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha a embalagem do produto. Limpar a área suavemente com água e secar completamente. • Traçar o tamanho do estoma no papel branco do verso da placa protetora, centralizando ao redor do orifício inicial. • Importante: Antes de recortar, separar as paredes da frente e de trás da bolsa a fim de evitar cortar sua parede frontal. • Aumentar o orifício central de acordo com o tamanho desejado usando uma tesoura de ponta curva. Não recortar além do último círculo marcado no papel protetor. • Deve-se ter o cuidado de exercer apenas uma leve pressão sobre o abdômen das crianças ao aplicar qualquer sistema de bolsa. • Dobre firmemente as extremidades do clipe em direção ao lado da bolsa com a placa protetora, assegurando-se de que o clipe esteja liso, plano e sem ondulações • A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e não houver sinais de irritação. 									
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.									
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029009									
NCM	3006.91.10									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1182 384 1220">Código ICC</th> <th data-bbox="384 1182 639 1220">Brasíndice</th> <th data-bbox="639 1182 895 1220">SIMPRO</th> <th data-bbox="895 1182 1193 1220">Característica</th> <th data-bbox="1193 1182 1471 1220">Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 1220 384 1258">20922</td> <td data-bbox="384 1220 639 1258">1197898</td> <td data-bbox="639 1220 895 1258">265699</td> <td data-bbox="895 1220 1193 1258">8 a 50 mm</td> <td data-bbox="1193 1220 1471 1258">15 bolsas</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa	20922	1197898	265699	8 a 50 mm	15 bolsas
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa						
20922	1197898	265699	8 a 50 mm	15 bolsas						