


**FICHA TÉCNICA**
**STOMAHESIVE® PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE**

<b>Nome Genérico</b>	Pasta preenchedora e barreira protetora de pele.			
<b>Nome Comercial</b>	Stomahesive® Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele			
<b>Imagem</b>				
<b>Descrição</b>	Stomahesive® Pasta é um material de enchimento, altamente eficaz como barreira protetora e selante da pele, para uso com dispositivos para cuidados de estomas.			
<b>Marca</b>	Stomahesive® ConvaTec®			
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana			
<b>Composição do Produto</b>	Gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, etanol, éster monobutílico do copolímero de éter metilvinílico, anidrido maleico, tris-12-hidroxiestearato de glicerila e triacetato de glicerila.			
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorção: As substâncias hidrocolóides tem capacidade de absorver a umidade provocada por escoriações, melhorando assim a fixação das placas e bolsas de estomia.</li> <li>• Regeneração tecidual: Os hidrocolóides demonstram excelente desempenho na regeneração do tecido danificado.</li> <li>• Utilizada para proteger a pele exposta ao redor de locais de fístulas entre a base do estoma e o orifício da placa protetora.</li> <li>• Excelente material de enchimento para dobras da pele e superfícies cutâneas irregular.</li> <li>• Facilmente removível 48 horas após a aplicação.</li> </ul>			
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso impressa no rótulo do mesmo.</b></p> <p><b>Método 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar um anel da pasta protetora ao redor da base do estoma ou borda da fístula, de cerca de 3 a 6 mm de largura. A pasta deve ser empregada em quaisquer dobras ou superfícies irregulares da pele até que seja obtida uma superfície uniforme.</li> <li>• Deve-se esperar um minuto até que a pasta seque. Caso seja necessária uma camada adicional, esperar mais um minuto para fixar o dispositivo escolhido sobre a pele.</li> <li>• A pressão feita na região central do dispositivo, ao redor do estoma, fará com que parte da pasta suba ao redor do estoma criando uma vedação adicional.</li> </ul> <p><b>Método 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após o preparo do dispositivo para aplicação (medição e corte), retirar o papel protetor siliconizado e aplicar um anel de pasta protetora, de cerca de 3 a 6 mm de largura, ao redor do orifício.</li> <li>• Esperar um minuto até que a pasta seque.</li> </ul>			
<b>Cuidados de Conservação</b>	Armazenar entre 10° e 30° graus. Limpar o bico do tubo e fechar bem após utilização.			
<b>Registro Sanitário</b>	Registro ANVISA Nº 80523020002			
<b>NCM</b>	3005.90.90			
<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
183910	1197662	1660097	Tubo com 56,7 gramas	1