


FICHA TÉCNICA
STOMAHESIVE® PÓ PROTETOR DE PELE

Nome Genérico	Pó protetor de pele			
Nome Comercial	Stomahesive® Pó Protetor de Pele			
Imagem				
Descrição	Stomahesive® Pó Protetor de Pele é uma substância não-estéril, granular, higroscópica, muita fina que adere às áreas úmidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações causadas pelos efluentes.			
Marca	Stomahesive® ConvaTec®			
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Limited – Reino Unido			
Composição do Produto	Substâncias Hidrocolóides absorventes: Gelatina e Carboximetilcelulose sódica Hidrocolóide protetor de mucosa e agente aglutinante: Pectina.			
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Absorção: As substâncias hidrocolóides tem capacidade de absorver a umidade provocada por escoriações, melhorando assim a fixação das placas e bolsas de estomia. • Regeneração tecidual: Os hidrocolóides demonstram excelente desempenho na regeneração do tecido danificado. • Substâncias hipoalergênicas: Pode ser utilizado em pacientes com pele sensível. 			
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso impressa no rótulo do mesmo.</p> <p>Stomahesive® Pó Protetor de Pele está indicado para o uso na pele periestomal como uma barreira protetora reduzindo o risco de irritação da pele causada pelos efluentes. Está indicado em peles escoriadas em geral.</p> <p>Modo de Uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1) Limpar a pele onde será aplicado o produto; • 2) Aplicar uma leve camada de pó sobre as áreas úmidas (escoriações de pele) e remover o excesso; • 3) Aplicar o dispositivo de estomia selecionado. • 4) Limpar o bico do frasco e fechar bem após o uso. 			
Cuidados de Conservação	Conservar em temperatura ambiente, evitando refrigeração e exposição à umidade excessiva.			
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA 80523029011			
NCM	3005.90.90			
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Descrição	Unidades por Caixa
25510	1197896	1660098	Frasco com 28,3 gramas	1