

FICHA TÉCNICA
ConvaTec® Clip de Fechamento Reto

Nome Genérico	Clip de fechamento para bolsa de estomia drenável										
Nome Comercial	ConvaTec® Clip de Fechamento Reto										
Imagem											
Descrição	O Clipse de Fechamento é composto por duas partes (“lâminas”) de polipropileno ligadas por uma dobradiça para fechamento mecânico da abertura de drenagem das bolsas de colostomia e ileostomia drenáveis.										
Marca	ConvaTec®										
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Dominican Republic Inc. – República Dominicana										
Composição do Produto	Resina de polipropileno e resina elastomérica termoplástica.										
Características do Produto	<p>Segurança: O mecanismo hermético do clip proporciona um ajuste seguro. Click audível: Permite saber que se foi realizado o ajuste perfeito. Resistência: O clip é elaborado com plástico resistente ao peso da bolsa e a manipulação frequente para drenagem do efluente.</p>										
Recomendações de Uso	<ul style="list-style-type: none"> • O clip de fechamento deve ser colocado antes da aplicação da bolsa. • Deve-se dobrar a extremidade aberta da bolsa sobre a parte inferior do clip, somente uma vez, e manter no lugar. • Em seguida, pressionar firmemente a parte “aberta” do clip (principalmente no centro), até ouvir um estalo (click) indicando que as partes se fecharam com segurança e estão travadas entre si. • Para remover o clip de fechamento deve-se destravar as partes do clip. • A durabilidade do clip de fechamento poderá variar de usuário para usuário e envolve a quantidade de vezes em que o clip será manipulado. Notando qualquer alteração que possa comprometer a segurança do fechamento da bolsa, o clip deverá ser substituído por um novo. 										
Cuidados de Armazenamento	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.										
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA: 80523029001										
NCM	3006.91.90										
	<table border="1"> <tr> <td>Código ICC</td> <td>Brasíndice</td> <td>SIMPRO</td> <td>Apresentação</td> </tr> <tr> <td align="center">175635</td> <td align="center">1197893</td> <td align="center">265719</td> <td align="center">10 unidades / caixa</td> </tr> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Apresentação	175635	1197893	265719	10 unidades / caixa		
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Apresentação								
175635	1197893	265719	10 unidades / caixa								