


**FICHA TÉCNICA**  
**DuoDERM® Gel**

<b>Nome Genérico</b>	Gel hidroativo
<b>Nome Comercial</b>	DuoDERM® Gel
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	<p>DuoDERM®Gel é um produto estéril*, em forma de gel. DuoDERM®Gel cria um ambiente cicatricial úmido que favorece o processo de cicatrização.</p> <p>*Processo de esterilização: Autoclavagem.</p>
<b>Marca</b>	DuoDERM® ConvaTec®
<b>Fabricante</b>	<p>ConvaTec Inc. – Estados Unidos</p> <p>ConvaTec Limited – Reino Unido</p>
<b>Composição do Produto</b>	Substâncias Hidrocolóides: Carboximetilcelulose Sódica, Pectina; Água 81.5% p/p e Propilenoglicol.
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promove hidratação do tecido seco: penetrando no leito da ferida, hidratando e favorecendo o desbridamento autolítico (remoção de tecido necrótico de forma natural e seletiva).</li> <li>• Mantém o ambiente úmido: favorece a promoção e formação de tecido de granulação.</li> <li>• Mantém o pH ligeiramente ácido (5,0 a 6,0): reduz o risco de infecção através do aumento da atividade de macrófagos no controle do crescimento bacteriano.</li> <li>• Absorve e proporciona umidade: Como um gel amorfo tem a capacidade de absorver e proporcionar a umidade de acordo com a necessidade da ferida.</li> </ul>
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</b></p> <p>DuoDERM®Gel é indicado para o tratamento de feridas de profundidade média ou total, tais como úlcera por pressão, úlcera de perna e úlcera diabética.</p> <p>Cuidados na aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar cuidadosamente a ferida com água estéril, solução salina ou com algum dos agentes de limpeza de uso comum na prática hospitalar. Secar a pele adjacente.</li> <li>• Desenroscar a tampa do tubo, retirar o anel de segurança branco e descartá-lo.</li> <li>• Recolocar a tampa a fim de perfurar o tubo.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar DuoDERM®Gel diretamente dentro da ferida. Não exceder o nível da pele ao redor da ferida.</li> </ul>		
<b>Cuidados de Conservação</b>	Armazenar até 25° graus evitando refrigeração.		
<b>Registro Sanitário</b>	Registro ANVISA 80523020006		
<b>NCM</b>	3005.90.90		
<b>Brasíndice</b>	1197969 / 1197970		
<b>SIMPRO</b>	0000265826 / 0000265828		
<b>Apresentação</b>	<b>Código ICC / SAP</b>	<b>Característica</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
	187990 / 1197969	Tubo com 15 gramas - Gel	10
	187987 / 1197970	Tubo com 30 gramas - Gel	3