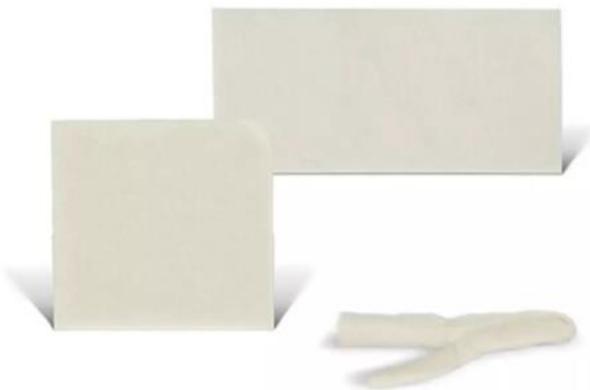


FICHA TÉCNICA
KALTOSTAT® Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Nome Genérico	Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio
Nome Comercial	Kaltostat® Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio
Imagem	
Descrição	Kaltostat® é um curativo estéril, de não tecido de fibras de alginato de cálcio e sódio, macio, de cor branca a quase branca, em formato de placa ou fita. As fibras de alginato absorvem o exsudato da ferida e transformam-se em uma camada firme de gel.
Marca	Kaltostat® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Limited – Reino Unido
Composição do Produto	Fibras de alginato de cálcio e sódio. Processo de esterilização: radiação gama
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltostat® foi projetado para criar um ambiente úmido que facilita a cicatrização de feridas. • O gel forma um ambiente úmido na interface com a ferida, e permite a remoção sem trauma, praticamente sem danos para o tecido recém formado. • Em contato com uma ferida hemorrágica, Kaltostat® promove hemostasia.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaltostat® é um curativo primário que deve ser utilizado com um curativo secundário de cobertura. • Dependendo das características da lesão o curativo pode permanecer no lugar até 7 dias. • Este produto é de uso único e estéril, qualquer porção não utilizada do curativo após abertura da embalagem deve ser descartada. • Kaltostat® pode ser utilizado em: pequenas abrasões, pequenas lacerações e queimaduras superficiais. Sob a supervisão de um profissional de saúde: úlceras de perna (úlceras de estase venosa, úlceras arteriais e úlceras de perna de etiologia mista), úlceras diabéticas e úlceras por pressão (parcial e total), áreas doadoras, incisões pós-cirúrgicas deixadas para cicatrização por segunda intenção e feridas externas causadas por trauma. • Outras indicações: manejo local de feridas hemorrágicas: lacerações, abrasões, sangramento de nariz, extração de dentes e após desbridamento cirúrgico; absorção de exsudato em feridas oncológicas, tais como tumores cutâneos fungóides, carcinoma fungóide, metástases cutâneas e Sarcoma de Kaposi.

Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada. Proteger da luz.			
Registro Sanitário	Registro ANVISA Nº 80523020007			
NCM	3005.90.90			
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa
168210	1115895	265724	5 x 5 cm	10
168212	1115896	265727	7,5 x 12 cm	10
168214	1197983	265725	10 x 20 cm	10
168215	1197984	265726	15 x 25 cm	10
168117	1197985	265720	Fita - 2 gramas	5