

**FICHA TÉCNICA**  
**SurePress™ Bandagem de Alta Compressão**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome Genérico</b>                      | Bandagem de alta compressão  |
| <b>Nome Comercial</b>                     | SurePress™ Bandagem de Alta Compressão   |
| <b>Imagem</b>                             |    |
| <b>Descrição</b>                          | <p>SurePress™ é uma bandagem leve, reutilizável e de cor cru que se adapta a pernas de diferentes tamanhos. Possui uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares que servem de guia para orientar a aplicação da quantidade adequada de compressão graduada durante a colocação da bandagem sobre a perna.</p> <p>SurePress foi desenvolvida para corrigir os vários graus de deficiência da circulação venosa na perna, exercendo uma compressão pré-determinada quando aplicada corretamente em volta da perna.</p>  |
| <b>Marca</b>                              | SurePress™ ConvaTec®   |
| <b>Fabricante</b>                         | ConvaTec Inc. – Estados Unidos<br>ConvaTec Limited – Reino Unido   |
| <b>Composição do Produto</b>              | SurePress é uma bandagem elástica composta de algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano (Lycra), com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares.  |
| <b>Características e Ações do Produto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SurePress™ é uma bandagem destinada ao uso em pacientes com retorno venoso prejudicado. Se o paciente tiver uma úlcera, SurePress™ deve ser usada sobre um curativo primário.</li> <li>• É indicada no tratamento de úlceras venosas de perna e afecções associadas onde está indicada a terapia por compressão.</li> <li>• Esta bandagem absorvente é macia, auxilia na distribuição da compressão graduada e protege a pele contra qualquer extravasamento de exsudato a partir do curativo primário.</li> <li>• Guia visual com indicador central (linha amarela): permite o posicionamento da bandagem em 50% para cada volta, seguindo a técnica de aplicação em espiral.</li> <li>• Facilidade de aplicação: Isso garante uma compressão adequada usando o indicador de tensão, retangular ou quadrado, de acordo com a medição do diâmetro do perímetro do tornozelo (normal / grande).</li> <li>• Reutilizável: sua composição permite reutilização (lavagens) até 20 vezes mantendo a elasticidade.</li> </ul> |

| <b>Recomendações de Uso</b>    | <p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar a úlcera de acordo com os procedimentos recomendados, enxaguar bem e secar a pele ao redor da úlcera antes da aplicação do curativo primário e da bandagem de compressão.</li> <li>• Após a colocação do curativo primário, pode-se utilizar uma bandagem absorvente como base antes da aplicação da bandagem de compressão.</li> </ul> <p><b>Aplicação da bandagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Determinar se a circunferência da perna é de tamanho “normal” ou “grande”. Se a circunferência do tornozelo for entre 18 e 26 cm, a perna é considerada de tamanho “normal”; se a circunferência do tornozelo for superior a 26 cm, a perna é considerada de tamanho “grande”.</li> <li>• 2. Selecionar na bandagem o indicador de extensão retangular menor para perna de tamanho normal ou maior para perna de tamanho grande.</li> <li>• 3. Começar a enrolar a bandagem pelo centro da planta do pé, colocando a extremidade inferior da bandagem na base dos dedos. Mantendo tensão leve, enrolar a bandagem uma volta e meia ao redor do pé.</li> <li>• 4. Prender a bandagem com o polegar da mão livre e começar a enrolá-la em volta do calcanhar.<br/>Bandagem esticada para perna de tamanho “normal”: o retângulo pequeno toma a forma quadrada.<br/>Bandagem esticada para perna de tamanho “grande”: o retângulo grande toma a forma quadrada.</li> <li>• 5. Enrole a bandagem sobre a parte da frente do tornozelo e debaixo do pé para cobrir o espaço livre.</li> <li>• 6. Esticar a bandagem até que o retângulo selecionado tome a forma quadrada. Circundar o tornozelo e continuar subindo em forma de espiral pela perna, sobrepondo a bandagem sobre a volta anterior em cerca de 50% de sua largura, usando a linha central contínua da bandagem como guia.</li> <li>• 7. Ao atingir a área logo abaixo do joelho, cortar qualquer excesso da bandagem, dobrar para baixo a extremidade cortada e prender com fita adesiva.</li> </ul> |                    |                |                    |                  |             |   |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| <b>Contra - Indicações</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úlceras arteriais e úlceras mistas venosas/arteriais.</li> <li>• Pernas com circunferência de tornozelo inferior a 18 cm.</li> <li>• Se ocorrer vermelhidão ou irritação, ou se os dedos do pé começarem a perder a cor, ou tornarem-se pretos ou azulados, suspender o uso e consultar um profissional de saúde.</li> </ul>   |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>Cuidados de Conservação</b> | Conservar a temperatura ambiente. Evitar refrigeração e exposição à umidade elevada.  |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>Registro Sanitário</b>      | Cadastro ANVISA Nº 80523029005  |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>NCM</b>                     | 3005.10.90  |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>Brasíndice</b>              | 1197971   |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>SIMPRO</b>                  | 22015   |                    |                |                    |                  |             |   |
| <b>Apresentação</b>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1897 826 1933">Código ICC / Local</th> <th data-bbox="826 1897 1166 1933">Característica</th> <th data-bbox="1166 1897 1445 1933">Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1933 826 1968">650947 / 1197971</td> <td data-bbox="826 1933 1166 1968">10 cm X 3 m</td> <td data-bbox="1166 1933 1445 1968">1</td> </tr> </tbody> </table>   | Código ICC / Local | Característica | Unidades por Caixa | 650947 / 1197971 | 10 cm X 3 m | 1 |
| Código ICC / Local             | Característica  | Unidades por Caixa |                |                    |                  |             |   |
| 650947 / 1197971               | 10 cm X 3 m   | 1                  |                |                    |                  |             |   |