


FICHA TÉCNICA
AQUACEL® Curativo de Hidrofibra

Nome Genérico	Curativo de Hidrofibra
Nome Comercial	AQUACEL® Curativo de Hidrofibra
Imagem	
Descrição	AQUACEL® é um curativo macio, estéril, absorvente, criando um gel macio e coeso, que se adapta intimamente à superfície da ferida, mantendo um ambiente úmido, o qual favorece o processo de cicatrização da ferida e auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico), sem danificar o tecido recém formado.
Marca	Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Limited – Reino Unido
Composição do Produto	Fibras de não tecido de carboximetilcelulose sódica. Processo de esterilização: Radiação gama.
Características e Ações do Produto	Os curativos AQUACEL® apresentam todos os benefícios da Tecnologia Hydrofiber® com poder de absorção maior e mais resistente. -Tecnologia Hydrofiber®: O exsudato da ferida é administrado pelo curativo através da capacidade de absorção e gelificação da Tecnologia Hydrofiber®. A camada hidrofílica de contato com a ferida cria um gel coeso em contato com o exsudado da ferida e moldando-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer. -Capacidade de retenção: A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em algumas situações AQUACEL® pode ser utilizado sem a supervisão de um profissional de saúde: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Abrasões, lacerações, pequenos cortes e pequenas escaldaduras e queimaduras;</i> • Nas demais situações onde há indicação de AQUACEL®, é necessária a supervisão de um profissional da saúde, são elas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Úlceras de perna, úlceras por pressão (Estágio II-IV) e úlceras diabéticas, feridas cirúrgicas (pós-operatórias, áreas doadoras, dermatológicas), queimaduras de profundidade parcial (segundo grau), feridas cirúrgicas ou traumáticas deixadas para cicatrizar por segunda intenção, tais como</i>

	<p><i>incisões cirúrgicas deiscidas, feridas cirúrgicas que cicatrizam por primeira intenção, tais como incisões cirúrgicas e dermatológicas (por exemplo, ortopédica e vascular), feridas traumáticas, tratamento local de feridas que sangram facilmente, tais como feridas que passaram por desbridamento mecânico ou cirúrgico e áreas doadoras, tratamento de feridas dolorosas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • O curativo é de uso único e não deve ser reutilizado, pois pode levar ao aumento do risco de infecção ou contaminação cruzada. • A lesão deve ser inspecionada a cada troca de curativo. • Pode permanecer no leito da lesão até no máximo 7 dias. • Para queimaduras de profundidade parcial (segundo grau) o curativo pode permanecer aplicado sobre a ferida até 14 dias, desde que não exista sinais de infecção ou até quando clinicamente indicado. • Este curativo deve ser utilizado em conjunto com a cobertura de um curativo secundário. 				
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.				
Registro Sanitário	Registro ANVISA: 80523020004				
NCM	3005.90.90				
	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa
	177901	1197988	265776	5 cm X 5 cm	10
	177902	1115892	265772	10 cm X 10 cm	10
	177903	1115893	265774	15 cm x 15 cm	5