


**FICHA TÉCNICA**
**Flexi-Trak™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres**

<b>Nome Genérico</b>	Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres
<b>Nome Comercial</b>	Flexi-Trak™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	Flexi-Trak™ é um dispositivo para fixação de sondas e cateteres na pele, tais como cateteres urinários, tubos de gastrostomia, tubos intravenosos, tubos renais, tubos torácicos, linhas venosas centrais, fios de marcapasso, tubos de reservatório, sondas de drenagem biliar, sondas de nefrostomia e sondas de drenagem peritoneal.
<b>Marca</b>	ConvaTec® Flexi-Trak™
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Limited – Reino Unido
<b>Composição do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa adesiva acrílica hipoalergênica: poliéter-di-ol, di-isocianato de diclorohexilmetano-4,4, di-isocianato de hexametileno e o dilaurato de dibutil-estanho 1,6-.</li> <li>• Lamina de espuma de polietileno.</li> <li>• Abas adesivas reutilizáveis: película de polietileno revestida no interior do adesivo acrílico hipoalergênico.</li> <li>• Tanto a placa adesiva quanto as abas reutilizáveis são protegidas por papel de silicone.</li> </ul>
<b>Características e Ações do Produto</b>	<p>Flexi-Trak™ consiste de uma placa adesiva para aderência à pele do paciente e do lado oposto consiste de uma folha de espuma de polietileno no qual está montado o sistema de fita adesiva (abas) reutilizável que prende os cateteres ou tubos na posição desejada.</p> <p>As extremidades das fitas adesivas reutilizáveis são azuis e permite a manipulação (abertura e fecho) das partes sem comprometer a adesividade.</p>
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida aos adesivos acrílicos e seus componentes.</li> <li>• Certifique-se de que a pele esteja limpa, seca e livre de algum tipo de pó ou substâncias gordurosas, e que a pele é íntegra.</li> <li>• Aplicar o adesivo para o local desejado na pele.</li> <li>• O cateter ou sonda deve ser posicionado no centro do dispositivo de fixação.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modele as abas adesivas ao redor do cateter/sonda. Verifique se o adesivo está seguro e bem fixado. As abas adesivas permitem o reposicionamento do cateter/sonda sempre que necessário.</li> <li>• O dispositivo pode permanecer na pele por até 5 dias. Porém, alguns cateteres podem ter menor tempo de permanência devido a movimentação do corpo. O contato com a água também pode reduzir o tempo de permanência do fixador.</li> </ul>			
<b>Cuidados de Conservação</b>	Evitar refrigeração e exposição à umidade elevada.			
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro ANVISA Nº 80523029004			
<b>NCM</b>	3005.10.90			
<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Formato</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
37449	1197931	266397	10 x 3,8 cm	50