



## Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack

### DESCRIÇÃO

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** é confeccionado em plástico rígido o que confere segurança e alta resistência, para esta classe de resíduos, evitando a contaminação dos usuários.

Disponível nos modelos de 7L e 13L, desenvolvido em formato retangular na cor branco, translúcido para facilitar a visualização do conteúdo interno, possui tampa que evita vazamentos. Sua abertura é feita através de uma sobre tampa (tampa de rosca), o que possibilita a abertura e o fechamento do coletor apenas no momento de descarte dos resíduos quimioterápicos.

Os coletores contam com pegaduras para transporte seguro.

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** possui etiqueta plástica com a simbologia de resíduo tóxico para melhor identificação.

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330660198

**Fabricante:** Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.

**Cadastro Anvisa:** 10330669046

**Fabricante:** Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.

## INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde resíduos são gerados durante a manipulação e administração de medicamentos quimioterápicos, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

## MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** é disponível nos modelos: 7,0L e 13L.

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Coletor:** Polietileno;
- ❖ **Tampa:** Polietileno;
- ❖ **Rótulo:** Plástico;

## VALIDADE

Indeterminada.

## CAPACIDADE

Capacidade Total	Capacidade Útil
------------------	-----------------

7,0L	5,3L
13,0L	10,0L

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. Caixa Master
Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack 7,0L	0144101	24 unidades
Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack 13,0L	0144301	20 unidades

## **INSTRUÇÕES DE USO**

---

### **Coletores Rígidos para Resíduos Quimioterápicos Descarpack**

- ❖ Monte o coletor fechado adequadamente a tampa principal, observando a selagem completa do encaixe;
- ❖ Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
- ❖ Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo;

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ A tampa deve ser fechada de maneira correta para que não haja perigo de o coletor abrir;
- ❖ Nunca jogue os resíduos quimioterápicos no lixo comum;
- ❖ A ausência de qualquer parte deste produto pode comprometer sua eficácia;
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Não encha o coletor acima do nível indicado;
- ❖ Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**


---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

## **ANEXO**

---

### **Instruções de uso de como fechar o produto Coletores Rígidos para Resíduos Quimioterápicos Descarpack**

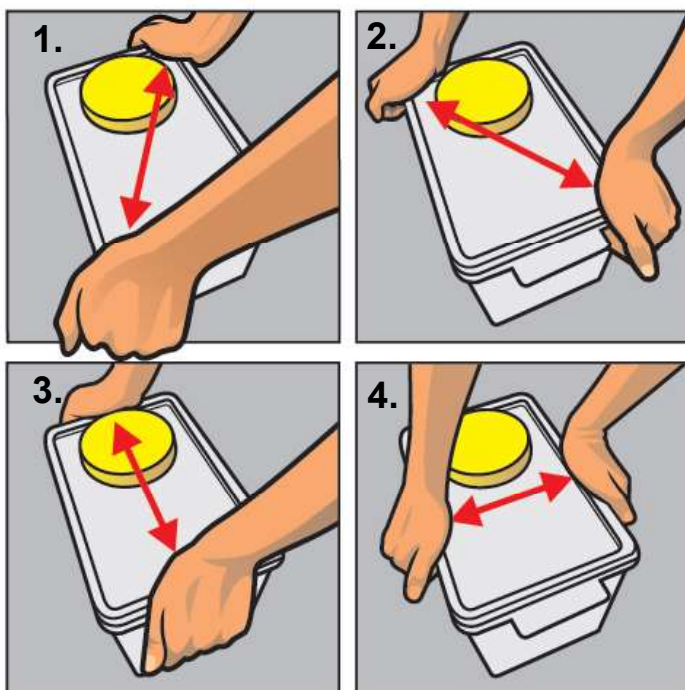

1. Coloque a tampa sobre o coletor;
  2. Pressione fortemente com as duas mãos na diagonal da tampa até ouvir um clipe;
  3. Repita o procedimento na outra diagonal;
  4. Pressione as 4 laterais, para finalização do encaixe;
- Pronto! Seu coletor está pronto para uso;