

MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO OU TIRAS CÓD. 198 E 214

CADASTRO ANVISA: 80175340004

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 6210.10.00

ORIGEM: NACIONAL



Três camadas Separadas

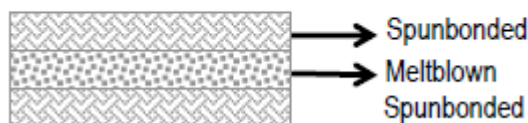


Imagem Ilustrativa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- **COMPOSIÇÃO** Camada externa - 100% Polipropileno- Spunbonded, atóxico e hipoalergênico – Não Esteril.
Camada Intermediária - elemento filtrante 100% Polipropileno- Meltblown, atóxico e hipoalergênico – Não Esteril.
Camada Interna – 100% Polipropileno – Spunbonded, atóxico e hipoalergênico – Não Esteril.
Clipe nasal – Alumínio revestido.
- **LARGURA** 180 mm
- **COMPRIMENTO** 95 mm
- **TAMANHO** Único
- **MODELOS** Com elástico “ Fio de Lycra Revestido” ou Tiras “ Tecido não Tecido 100% Polipropileno.
- **INDICADO PARA USO DE:** Profissionais da Saúde, Pacientes, Indústrias Alimentícias, Químicas, Farmacêuticas e outros estabelecimentos que exija seu uso.
- **INSTRUÇÕES DE USO:** 1- Remover a máscara da embalagem original;
2- Colocar a máscara sobre o rosto;
3- Amarrar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas;
4- Ajustar o clipe da máscara ao nariz;
5- Após o uso, descartar em recipiente para materiais contaminados.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- ✓ **PROPRIEDADES VISUAIS:** O produto deve estar livre de qualquer material estranho, buraco, rasgo, mancha, sinal de umidade.
- ✓ **ODOR:** O produto não deve ter nenhum odor diferente do odor característico do material.
- ✓ **EMBALAGEM:** Embalados em embalagens plásticas de PEBD virgem (embalagem primária) e acondicionado em caixas de papelão (embalagem secundária) contendo as seguintes informações: Dados do fabricante, descrição do material, código do material, quantidade, número do lote, mês de fabricação, validade, Registro ANVISA.
- ✓ **VALIDADE:** 2 anos a partir da data de fabricação.
- ✓ **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO INDICADO:** Óxido de Etileno “ETO”.
- ✓ **MÉTODO DE DESCARTE:** Conforme os protocolos estabelecidos do estabelecimento onde se fará a utilização.
- ✓ **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** Produto de uso único, não deve ser reutilizado. Em caso de dúvida quanto à integridade da embalagem do produto, não utilizar.